





Raizer II – innovativ løftestol som sikrer et stabilt og trygt løft



Raizer II er en batteridrevet mobil løftestol som på få minutter hjelper en person som har falt, opp til nesten stående stilling.

Løftestolen betjenes enkelt av én hjelper, og krever begrenset med fysisk innsats utover en støttende hånd. Hjelperen foretar derfor ikke et løft eller en forflytning hvor armer eller rygg utsettes for overbelastning. Hjelperen betjener løftestolen ved hjelp av en fjernkontroll eller ved hjelp av et betjeningspanel på

siden av stolen. For den som har falt betyr det mye å bli hjulpet opp på en sikker måte. Under hele løftet fra liggende til stående har personen kontakt med gulvet. Løftebevegelsen er jevn og skånsom, og som en ekstra sikkerhet kan man få stolen utstyrt med ett eller flere justerbare sikkerhetsbelter som sikrer god stabilitet for den som har falt. Raizer II er en forbedret versjon av den originale Raizer med nytt design og forbedrede funksjoner.

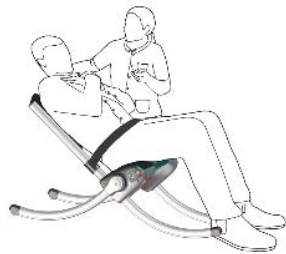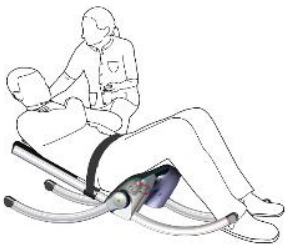

Raizer II

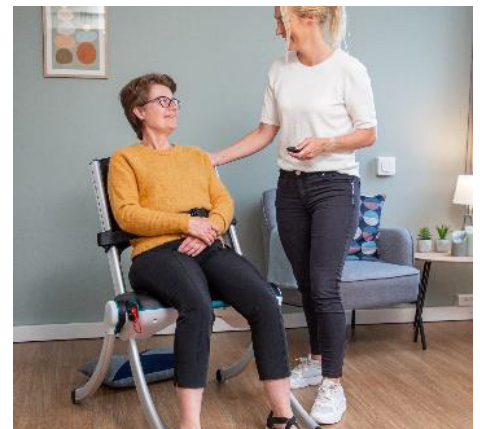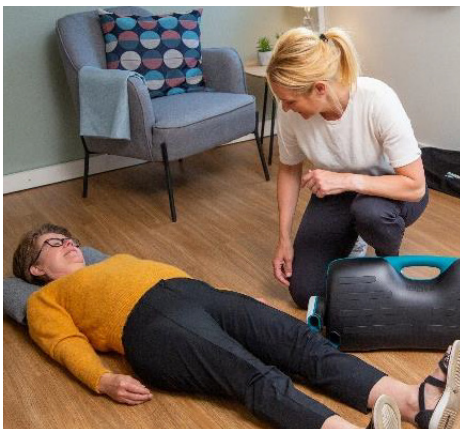

Verdt å vite for helsepersonell

- Er batteridrevet og løfter ved ett knappetrykk
- Løfter personer opp til 150 kg
- Løfter fra liggende på gulvet, til sittende i stol
- Benyttes av kun én person
- Enkel å frakte med seg lav vekt og lett å bære
- Monteres raskt rundt personen som har falt (3 minutter)
- Trygg og behagelig for den som har falt
- Ergonomisk løfting
- Reduserer ventetiden til den som har falt
- Reduserer arbeidstiden til den som jobber
- Innsparing på arbeidskraft
- Reduserer risikoen for belastningsskader hos den som hjelper
- Øker selvfølelsen til den som har falt
- Raizer = kosteffektiv

Standardutstyr:


- Setedel, ben og rygg
- To ladere
- Transportbag
- Transporttrekk til sete

Beskrivelse	Art. nr.	HMS. nr.
Raizer II	105029	215198



Enkel å rengjøre

- Alle overflater er designet for å være lette å rengjøre
- Den nye overflaten kan desinfiseres
- Sikkerhetsbeltet kan tas av og vaskes

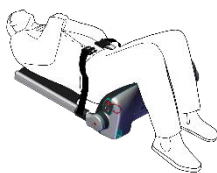

Overflatene er lette å rengjøre



Sikkerhetsbelte



Lys som indikerer riktig montering



Endestopp sikrer riktig posisjon

Enkel å montere

- Fire identiske bein og to identiske rygglenner sikrer korrekt montering hver gang
- Intuitive lyder og LED lys forsikrer deg om riktig montering
- Endestopp sikrer riktig posisjon av løftestolen, både under bruk og etter demontering
- Ett eller flere sikkerhetsbelter kan monteres på ryggstøttene slik at personen som har falt kan føle seg trygg og komfortabel under hele løftet. Ved bruk av flere sikkerhetsbelter kan man sikre personen på flere steder på overkroppen for større sikkerhet.

Fjernkontroll og nødstop

- Fjernkontrollen oppbevares på siden av løftestolen
- Intuitiv knapp for nødstop
- Påminnelse om service (ettersyn)
- Batteriindikator



Fjernkontroll og nødstop



Praktisk oppbevaring av fjernkontroll

Raizer II	Tekniske data
Løftekapasitet	150 kg
Løfte tid	20-30 sekunder
Vekt	Setet 8,5 kg, bein og rygg 4,5kg. Totalt 13 kg
Lader	2 pk: Soniel 12V og billader 12V
Antall løft på fullt batteri	Ca. 40 på maks belastning, ca. 80 på gjennomsnittlig belastning
Ladetid	Ca. 6 timer
Batteri	LiFePo4
Lading av tomt batteri	10-15min = 1 løft
Støynivå	< 70 dB A
Driftstemperatur	+5 °C til + 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-25 °C til + 70 °C
Vann og støv	IP 52 (støvsikret, beskyttet mot dryppende vann)
Forventet levetid	> 5 år
Bredde (stående)	686 mm
Høyde (stående)	1252 mm
Dybde (stående)	671 mm
Bredde (liggende)	686 mm
Høyde (liggende)	1319 mm
Dybde (liggende)	321 mm



Tilbehør



Fjernkontroll



Sikkerhetsbelte



Transportvogn



Batterilader



Trappehjul



Ladekabel, USB



Sykkelbrakett for transportvogn




Transportbag



Hygienetrekk



Setetrekk

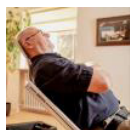

Hodestøtte

Beskrivelse	Art.nr.	HMS.nr
Fjernkontroll	105026	
Transportvogn	107273	
Trappehjul (tre stk) for transportvogn	103314	
Sykkelbrakett for transportvogn, sett	103313	
Engangs hygienetrekk, 10 stk	103741	
Setebelte	107250	
Batterilader 15W, multi AC plugg	105192	
Ladekabel, USB	105082	
Transporttrekk til sete	107240	
Transportbag	107463	
Hodestøtte	107464	