

Instruksjoner for bruk

HERO **XXL**



Innholdsfortegnelse

I. Generell informasjon	side
1.1 Forord	2
1.2 Formål og indikasjon	2
1.3 Notater	3
1.4 Samsvarserklæring	3
1.5 Garantibetingelser	3
1.6 Service og reparasjoner	3
1.7 Brukeropplæring	3
1.8 Godkjenning/kompatibilitet med hensyn til kombinasjonen med3 kommersielt tilgjengelige bilbarnestoler	
1.9 Kontraindikasjoner	3
II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet	
2.1 Bli kjent med HERO-XL	4-5
2.2 Sikkerhetsinstruksjoner	6
2.3 Bruk i kjøretøyet	7
2.4 Nedre festepunkter	7
2.5 Festing av strammestroppene	8-9
2.6 Installasjon i kjøretøyet	10-12
III. Håndtering og funksjon av grunnmodellen	
3.1 Spenne fast barnet	13-15
3.2 Justering av hodestøtten	16
3.3 Fjerning fra kjøretøyet	17-18
3.4 Pleie og vedlikehold	19
IV. Bruk av ekstraustyret	
4.1 Thorax pelotter	19
4.2 Abduksjonskile	19
4.3 Støtte- og sikkerhetsputer	20
4.4 Adapter for setedybde	20
V. Garanti	21
VI. Merking	21
VII. Tekniske data	22

I. Generell informasjon

1.1 Forord

Du har bestemt deg for bilbarnestolen "HERO-XL" og får nå et produkt av høy kvalitet fra vårt firma. Vi takker for tilliten du har vist oss.

Vi gir deg denne bruksanvisningen for at du skal ha glede av dette produktet i lang tid og for å gjøre hverdagen din enklere. Den viser deg hvordan du bruker produktet på en enkel og korrekt måte, og hvordan du tar vare på og vedlikeholder det. Les nøye gjennom de følgende instruksjonene og merknadene for å unngå skader som følge av feilbetjening og for å sikre optimal bruk. Hvis du har ytterligere spørsmål eller problemer, kan du kontakte forhandleren din. Vi ønsker deg god fornøyelse med bruken og håper at våre produkter innfrir dine forventninger.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i versjonen som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Les og følg installasjonsinstruksjonene på sidene 7 - 12 før du installerer i bilen og tar den i bruk for første gang.

Sørg for at bruksanvisningen følger med produktet og dermed er tilgjengelig for alle brukere.

Din HERNIK GmbH

1.2 Formål og indikasjon

HERO-XL er utviklet for transport av barn med spesielle behov (GMFCS 3-5; f.eks. uttalt muskulær hypotoni med manglende hode- og trunkuskontroll) i motorkjøretøy. Barn med dårlig hode- og overkroppskontroll (f.eks. cerebral parese, muskeldystrofi, hypotoni, motorisk utviklingsforstyrrelse) kan få støtte i kroppsholdningen ved hjelp av setevinkelen og spesialputene som inngår i grunnutstyret, og dermed sikres trygg transport.

Viktig ekstrautstyr gjør det mulig å ta hensyn til spesielle aspekter i detalj, f.eks. montering av en stabil abduksjonskile, thoraxstøtter, setedybdeadapter eller støtte- og sikkerhetspute. Mer om dette i kapittel IV.

I. Generell informasjon

1.3 Merknader

HERO-XL bilbarnestol for funksjonshemmede består av:

1. et standard Axkid-bilbarnestol (se produsentens bruksanvisning).
2. en tilpasningsmodul med tilbehør som gjør at du kan utstyre bilbarnestolen etter barnets individuelle behov. Vennligst se bruksanvisningen fra HERNIK GmbH.

1.4 Samsvarserklæring

HERNIK GmbH erklærer på eget ansvar at bilbarnestolen "HERO-XL" er i samsvar med de grunnleggende kravene (vedlegg 1 i direktiv 93/42/EØF). Produktet er merket med CE-merket i henhold til ovennevnte direktiv.

1.5 Garantibetingelser

Garantien kan bare gis hvis produktet brukes under de angitte forholdene og til de tiltenkte formålene. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av komponenter og reservedeler som ikke er godkjent av produsenten.

1.6 Service og reparasjoner

Service og reparasjoner på HERO-XL må kun utføres av spesialiserte forhandlere. Hvis du har problemer, må du kontakte din autoriserte forhandler. Kun originale reservedeler er tilgjengelige for reparasjoner.

1.7 Brukeropplæring

Bilstolen leveres ferdig montert. Ved levering instruerer forhandleren brukeren i bruk av hjelpemiddelet ved hjelp av bruksanvisningen. Fagforhandleren skal montere bilbarnestolen i bilen sammen med brukeren. For å oppnå en optimal sittestilling er det nødvendig å tilpasse bilbarnestolen individuelt til barnets situasjon. Dette bør alltid gjøres av forhandleren.

1.8 Godkjenning/kompatibilitet i kombinasjon med standard bilbarnestoler


HERO-XL er en godkjent bilbarnestol med alt tilbehør i henhold til ECE R129/03. Enkeltodeler og tilbehør til HERO-XL er ikke godkjent for kombinasjon med andre kommersielt tilgjengelige bilbarnestoler. En modifisering kan ugyldiggjøre godkjenningen av HERO-XL og av standard bilbarnestol.

II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet



II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet

2.1 Bli kjent med HERO-XL

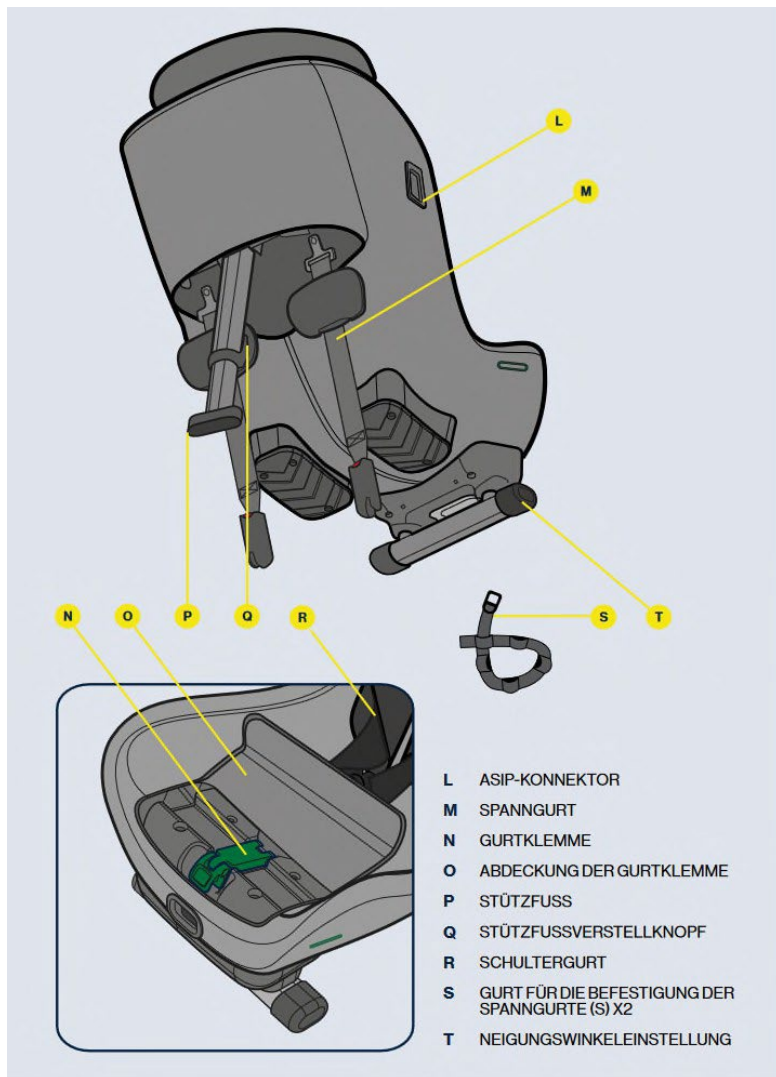

II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner

- HERO-XL må alltid festes i bilen i henhold til monteringsanvisningen, selv om den ikke er i bruk. Et usikret sete kan skade andre passasjerer i bilen ved en nødbremsing.
- HERO-XL må festes i bilen på en slik måte at den ikke klemmes fast av forsetene eller bildørene.
- Stroppene må ikke vris eller klemmes, og de må være strammet til.
- Bilstolen må ikke brukes på nytt etter en ulykke!
- Fest alltid sikkerhetsbeltet til barnet ditt.
- Før hver kjøretur må du kontrollere at sikkerhetsbeltet er riktig låst og at stativet er riktig plassert.
- Sørg også for at alle faste gjenstander og plastdeler på HERO-XL er festet på en slik måte at de ikke kan komme i klem i et sete som beveger seg eller i en dør under daglig bruk av kjøretøyet.
- Det anbefales at bagasje og andre gjenstander sikres forsvarlig.
- Bilbarnestolen må ikke brukes uten trekket.
- Vær oppmerksom på at bilbarnestolen kan bli for varm for barnets hud hvis den blir stående lenge i solen uten tekstiltrekket.
- Dekselet må kun erstattes av det originale HERNIK-dekselet.
- Ikke la barnet sitte i bilsetet uten tilsyn.
- Ikke gjør noen endringer eller tilføyelser på enheten.
- Følg installasjonsinstruksjonene fra HERNIK nøye.
- Bruksanvisningen skal alltid medbringes i kjøretøyet.

II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet

2.3 Bruk i kjøretøyet

HERO-XL rehab-bilstolen kan bare monteres bakovervendt. Den passer til de fleste, men ikke alle seter. Se bilens instruksjonsbok for informasjon om hvilke bilseter som er godkjent for bruk av barnesikringssystemer i henhold til ECE R16.

Mulige bruksområder HERO-XL (i-SIZE):

Beifahrersitz (kein aktiver Airbag)	JA/NEIN*
Beifahrersitz (aktiver Airbag)	NEIN
Rücksitz mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt	JA
Sitz mit Zweipunkt-Sicherheitsgurt	NEIN
Seit- und rückwärtsgerichtete Sitze	NEIN



VIKTIG! Hvis du ønsker å montere HERO-XL-barnestolen i et sete med kollisjonspute foran, må kollisjonsputen deaktiveres i henhold til bilprodusentens anvisninger. Vær oppmerksom på at kollisjonsputen i enkelte biler bare kan deaktiveres av et autorisert servicesenter.

2.4 Nedre Festepunkter

Forovervendte sikkerhetsbelter brukes til å forbedre beskyttelsen av barn i bil ved å gi en fast og stabil montering av bakovervendte barneseter med belte. Denne innfestingen øker sikkerheten til barnet ditt i alle typer kollisjoner, inkludert velt og påkjørsel bakfra.

Strammestroppene sikrer en presis og enkel montering i kjøretøy med forhåndsinstallerte nedre festepunkter. Forhåndsinstallerte nedre festepunkter i kjøretøy er ofte plassert på seteskinnene som er festet til gulvet, men andre posisjoner er også mulige. For mer informasjon om brukbare festepunkter, se bruksanvisningen til kjøretøyet. Hvis kjøretøyet ditt ikke har nedre festepunkter, kan du bruke de ekstra stroppene for nedre feste (S) som følger med HERO-XL. Du finner monteringsanvisninger i denne håndboken.

VIKTIG: Bruk aldri HERO-XL uten strammestroppene etter at

II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet

2.5 Fest strammestroppene på

1 se s.10

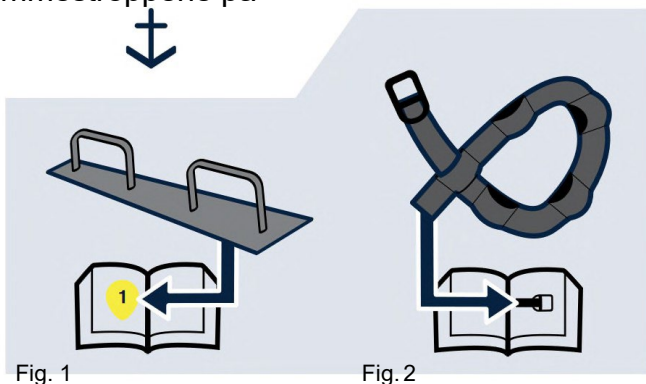


Fig. 1

Fig. 2

Hvis kjøretøyet ditt ikke har egnede forhåndsinstallerte nedre festepunkter (fig. 1), kan du bruke de nedre festestroppene som følger med HERO-XL (fig. 2). Avhengig av kjøretøyet og seteposisjonen du ønsker å montere barnesetet i, finnes det flere mulige festepunkter for stroppene (se neste side):

For å montere stroppene til det nedre festet (S), fører du stroppen rundt det valgte festepunktet og fører metallforankringen gjennom en av åpningene på stroppen (fig. 3). Festestroppen har flere spor som kan brukes. Sørg for å bruke det sporet som er nærmest metallforankringen, slik at metallforankringen monteres så nær kjøretøyet gulv som mulig. Trekk deretter i metallforankringen for å stramme stroppen, og gjenta prosessen for den andre stroppen. Når du monterer HERO-XL, må du alltid bruke to festepunkter, som også bør være adskilt fra hverandre, da dette gir en mer stabil montering.

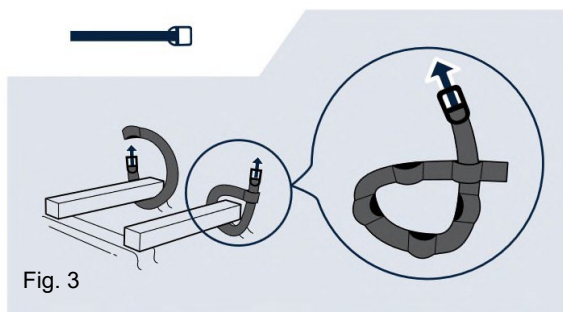


Fig. 3

II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet

Alternativer for føring av festestroppen:


alt. a) Før stroppen rundt kanten av det forhåndsinstallerte festepunktet (bruk denne metoden bare hvis de forhåndsinstallerte festepunktene ikke passer direkte med de nedre festestroppene)

b) Fest beltet rundt seteskinnen foran barnesetet ved å føre beltet mellom seteskinnen og bilens gulv eller gjennom et egnet hull i seteskinnen.

gammel. c) Fest beltet rundt seteskjøten på bilsetet foran barnesetet ved å føre beltet mellom ryggstøtten på bilsetet og sitteputen.

d) Fest beltet rundt seteskinnen under barnesetet ved å føre beltet mellom seteskinnen og bilens gulv eller gjennom et egnet hull i seteskinnen.

e) Hvis HERO-XL er montert på et passasjersele og ingen av de ovennevnte alternativene er mulige, kan du feste stroppene for det nedre festet til et egnet festepunkt bak i kjøretøyet og føre stroppene under bilsetet til fronten av kjøretøyet. Pass på at festestroppene kommer ut foran på setet og ikke på sidene.

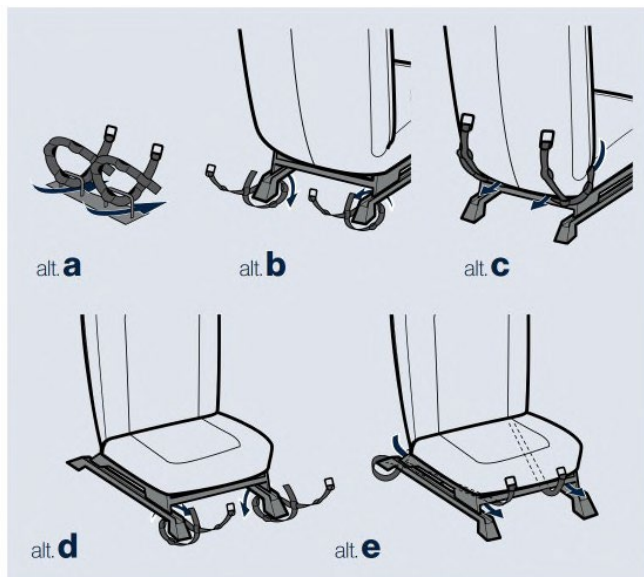


II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet

2.6 Installasjon i kjøretøyet

1) Åpne glidelåsen og åpne dekselet til belteklemmen (O).

2) Plasser HERO-XL på bilsetet med baksiden av barnesetet vendt mot fronten av kjøretøyet. Juster benplassen til barnet ved å flytte barnesetet frem og tilbake på bilsetet. HERO-XL kan monteres nær baksiden av bilsetet, men må aldri monteres slik at skulderen (J) henger over kanten av bilsetet. Sørg for at den vertikale linjen (K) på hælen (J) aldri krysser over kanten på bilsetet.


Juster setevinkelen på barnesetet ved å trykke på spaken for justering av setevinkelen (G) og velge en passende posisjon. For maksimal sikkerhet bør du velge en stilling som er så oppreist som mulig, samtidig som du sørger for at barnets hode ikke faller forover når det sover. Av hensyn til komfort og sikkerhet bør ryggvinkelen justeres til en mer oppreist stilling etter hvert som barnet vokser. Vær oppmerksom på at barnesetet vipper litt mer bakover når strammebåndene (M) strammes, fordi det synker ned i bilsetets polstring. Når HERO-XL monteres på et passasjer sete foran, er det mulig, men ikke nødvendig, at baksiden av barnesetet kommer i kontakt med dashbordet.

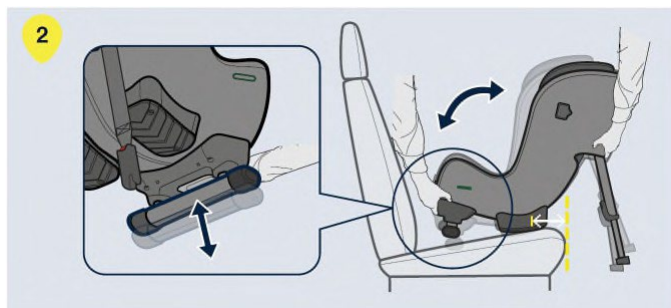


3) Åpne belteklemmen (N). Trekk ut en armlengde av bilbeltet og før det gjennom sikkerhetsbelteåpningen (D) som er nærmest deg. Før beltet gjennom belteklemmen (N) og deretter gjennom sikkerhetsbelteåpningen (D) på motsatt side. Fest bilbeltet med beltespennen, og trekk godt i skulderdelen av bilbeltet slik at det strammes og barnesetet sitter godt fast. Jo hardere du trekker, desto strammere blir monteringen. Når barnesetet er godt festet, lukker du belteklemmen (N) og låser bilens sikkerhetsbelte i posisjon. Pass på at både skulder- og hoftebelte er låst sammen i belteklemmen (N). Lukk

II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet

2.6 Montering i kjøretøyet

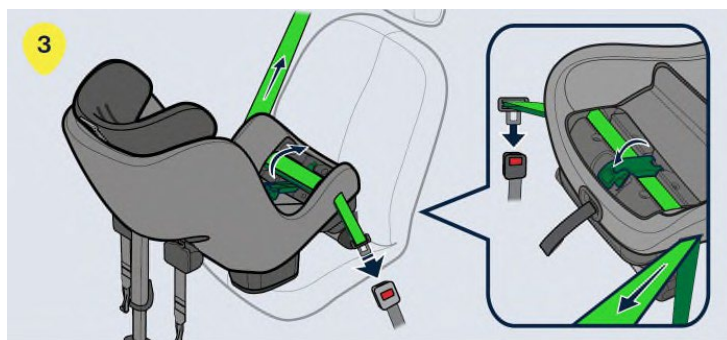


4) Trekk strammebåndene (M) ut av barnesetet, og fest dem til de nedre festepunktene i bilen. Du finner mer informasjon i avsnittet "Nedre festepunkter" på side 7 i denne bruksanvisningen. Trykk toppen av barnesetet ned og rykk barnesetet sidelengs frem og tilbake. De selvstrammende stroppene (M) på HERO-XL strammes da automatisk. Ved å stramme stroppene (M) stiller du også inn den endelige helningsvinkelen til barnesetet. Trykk på barnesetet til det er godt festet og du har oppnådd en passende setevinkel. Kontroller om den hvite markeringen på den nedre festestroppen er synlig. Hvis ikke, er de nedre festepunktene for nær barnesetet og må justeres. Hvis dette ikke er mulig, kan du også krysse strammestroppene bak setet for å få litt mer avstand.

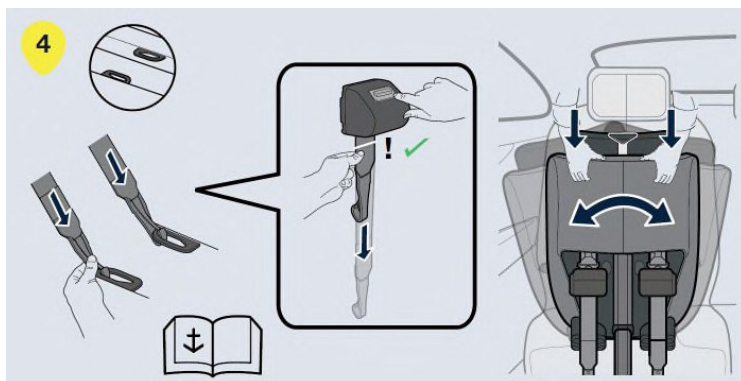


II. Sikkerhet og installasjon i kjøretøyet

2.6 Montering i kjøretøyet

5) Trekk støttebenet (P) ut av barnesetet. Trykk på støttebenknappen (Q) og trekk støttebenet (P) nedover til det berører bilens gulv. Slipp støttebenknappen (Q) og løft barnesetet oppover for å trekke støttebenet (P) lenger ut, helt til du hører en klikkelyd. Støttebenet (P) skal nå være låst og presset fast mot bilens gulv. Pass på at støttebenet (P) er vinklet ca. 10° mot fronten av kjøretøyet. Kontroller igjen at bilbeltet fortsatt er stramt, og at hoftebeltet ikke har blitt slapt når du strammer de nedre festestroppene og støttebenet. Hvis bilbeltet har mistet noe av spenningen, strammer du det bare på nytt ved å gjenta trinn 2 i disse instruksjonene uten å løsne strammebåndene.

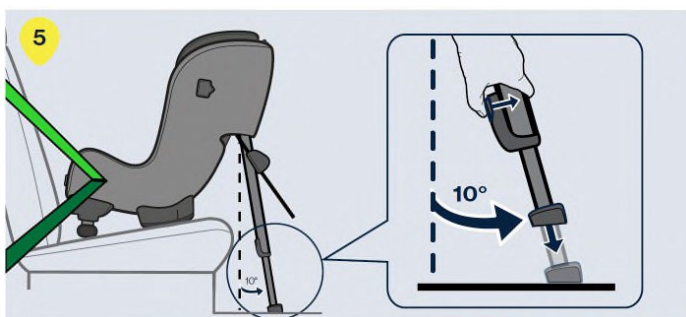

6) Skyv ASIP (I) inn i sporene på ASIP-kontakten (L), og trykk den ned til ASIP (I) klikker på plass. Hvis det er et plastdeksel på ASIP-kontakten (L), må du fjerne det og plassere det på ASIP-kontakten (L) på motsatt side av setet før du fester ASIP (I). Sørg for at ASIP (I) er festet på den siden av HERO-XL-barnestolen som er nærmest bildøren.

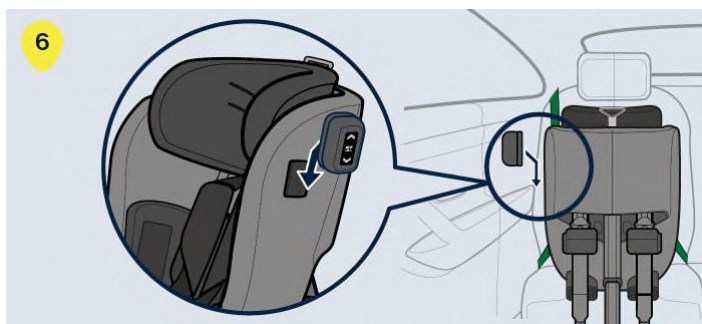

III. Håndtering og funksjon av grunnmodellen

3.1 Fest barnets sikkerhetsbelte


Før du spenner fast barnet i HERO-XL-barnestolen, må du forsikre deg om at det riktige innlegget er montert i stolen. HERO-XL er utviklet for å vokse med barnet ditt og for å sikre en komfortabel og sikker passform for barn. Det anbefales å bruke innlegget til det er for stramt for barnet.

HERO-XL er utstyrt med en automatisk nakkestøtte (A), som automatisk senkes ned i riktig posisjon når det integrerte sikkerhetsbeltet festes. For å sikre en optimal posisjon anbefaler HERNIK at du bruker denne funksjonen hver gang du fester sikkerhetsbeltet til barnet ditt. Før du plasserer barnet i barnesetet, må du forsikre deg om at den automatiske hodestøtten (A) er i ulåst posisjon.

7) Kontroller at hodestøttebremsspaken (H) er i ulåst posisjon. Hvis spaken er i låst posisjon, skyver du den til ulåst posisjon.




8) Løsne det integrerte sikkerhetsbeltet ved å trykke på utløserknappen for beltet (E) og trekke ut begge skulderstroppene (R) samtidig. Unngå å trekke i bare ett belte, da dette kan føre til at skulderbeltene (R) blir ujevne. Kontroller at hodestøtten (A) er i øverste posisjon:

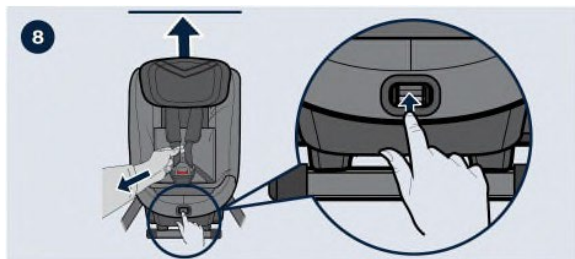


III. Håndtering og funksjon av grunnmodellen

3.1 Fest barnets sikkerhetsbelte

9) Lås opp beltespennen ved å trykke på utløserknappen (C), og plasser beltene utenfor setet.

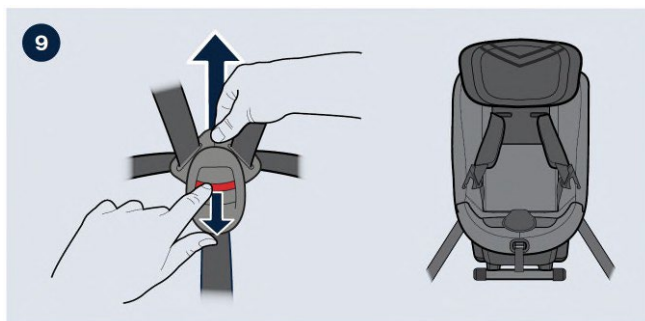


10) Plasser barnet i setet og legg skulderstroppene (R) over barnets skuldre. Lås det integrerte sikkerhetsbeltet ved først å føre de delene av spennen som er festet til skulderstroppene (R) sammen, og deretter skyve dem inn i spennen til du hører et klikk.

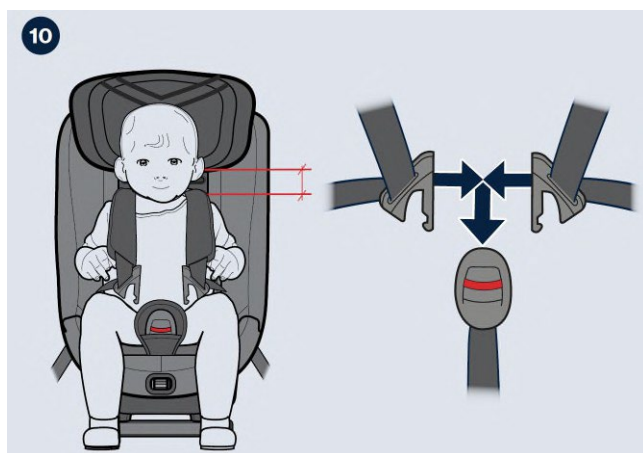

III. Håndtering og funksjon av grunnmodellen

3.1 Fest barnets sikkerhetsbelte

11) Trekk i skulderstroppene (R) for å stramme det integrerte sikkerhetsbeltet over hoftene til barnet. Mens skulderstroppene (R) fortsatt er stramme, trekker du beltestrammeren (F) rett bort fra barnesetet til beltet er stramt nok. Det skal ikke være plass til mer enn én finger mellom skulderstroppene (R) og barnets skuldre. Når beltet er strammet, beveger hodestøtten (A) seg automatisk nedover til den posisjonen som passer for barnet.

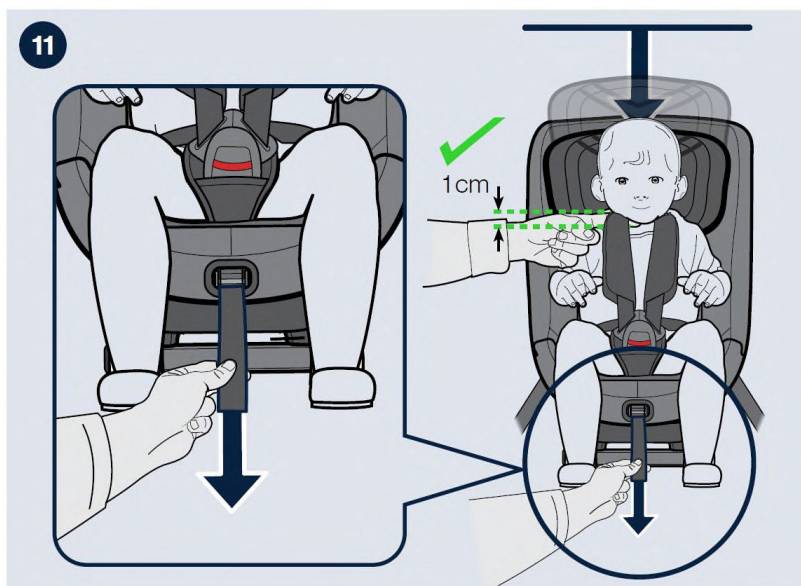

III. Håndtering og funksjon av grunnmodellen

3.2 Justering av hodestøtten

HERO-XL er utstyrt med en automatisk hodestøtte (A), som sørger for at hodestøtten (A) alltid er i den optimale posisjonen for barnet ditt. Når det integrerte sikkerhetsbeltet strammes, senkes hodestøtten (A) til riktig høyde og låses automatisk på plass. Når beltet løsnes, beveger hodestøtten (A) seg tilbake til sin øverste posisjon og låses opp. For å sikre en optimal posisjon anbefales det at du bruker denne funksjonen hver gang du fester sikkerhetsbeltet til barnet ditt.

Nakkestøtten (A) er kun ulåst i sin øverste posisjon. Det er derfor viktig at hodestøtten (A) går helt tilbake til øverste posisjon når det integrerte sikkerhetsbeltet løsnes, ellers vil hodestøtten (A) forbli låst og ikke bevege seg nedover når beltet spennes.

Hvis du vil deaktivere den automatiske justeringen og holde hodestøtten (A) i en fast posisjon, flytter du hodestøtten (A) til ønsket posisjon og flytter hodestøttebremsspaken (H) til låst posisjon. Nakkestøtten (A) er nå låst i riktig høyde og vil ikke lenger bevege seg før du flytter nakkestøttebremsspaken (H) tilbake til ulåst posisjon.

Hvis du bruker HERO-XL med en fast nakkestøtte (A), må du sørge for at nakkestøtten (A) er i riktig posisjon for barnet ditt.

Kontroller at skulderstroppene (R) går gjennom setet direkte fra barnets skuldre eller maksimalt 1 cm over dem. Hvis ikke, justerer du hodestøtten (A) ved å flytte hodestøttebremsspaken (H) til ulåst posisjon og skyve hodestøtten (A) til øvre posisjon for å låse den opp, og gjenta deretter prosessen.

MERK! Når hodestøtten er trukket ut, kan ryggputen foldes ut (fig. 1). Så snart høyden på nakkestøtten reduseres igjen, må ryggputen foldes ned tilsvarende (fig. 2).



Fig. 2


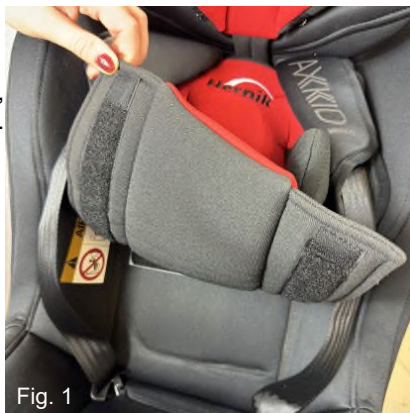


Fig. 1


III. Håndtering og funksjon av grunnmodellen

3.3 Fjerning fra kjøretøyet


1) Åpne glidelåsen og åpne dekselet til belteklemmen (O). Lås opp bilens sikkerhetsbelte ved å trykke på den røde knappen på beltespennen. Åpne belteklemmen (N) og trekk bilbeltet gjennom beltesporene (D) for å fjerne det fra barnesetet (fig. 1).

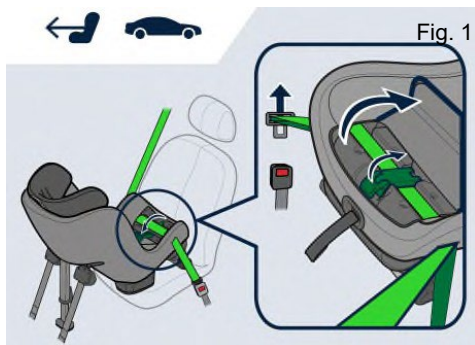

2) Lås opp de nedre festestroppene (M) ved å holde kontaktene med hånden og trykke på den røde knappen med tommelen. Fortsett å holde kontakten i hånden og før den sakte tilbake til barnesetet. Pass på at du ikke slipper kontakten på den nedre stroppen, da den automatisk vil trekke seg tilbake i høy hastighet (fig. 2).

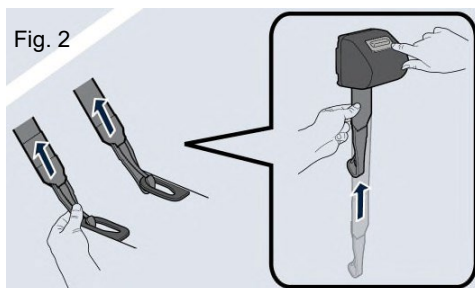

3) Trykk på støttefotknappen (Q) og før støttefoten (P) til sin korteste posisjon (fig. 3).

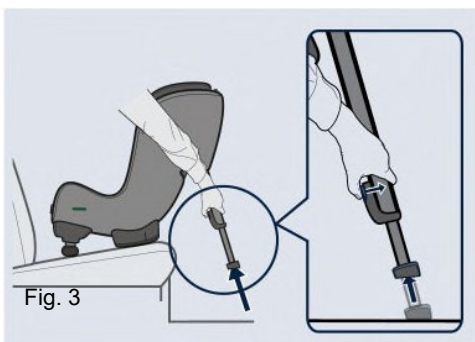

III. Håndtering og funksjon av grunnmodellen

3.3 Fjerning fra kjøretøyet

4) Trykk på spaken for setevinkeljustering (G), og skyv setevinkeljusteringen (T) til korteste posisjon. Løft HERO-XL ut av kjøretøyet.

TIPS! Lås beltespennen og stram selen før du tar barnesetet ut av bilen. Da kan du bruke skulderstroppene (R) som bærehåndtak for å gjøre det enklere å løfte ut barnesetet og transportere det utenfor bilen.

VIKTIG: Bær aldri barnesetet i hodestøtten (A).

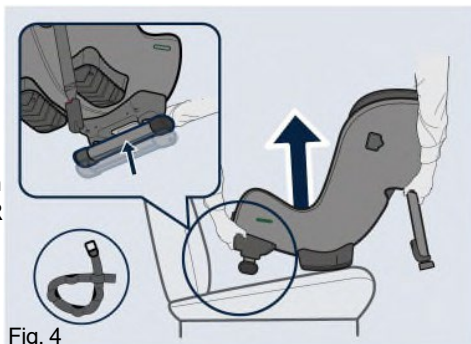


Fig. 4

3.4 Pleie og vedlikehold

Generelle instruksjoner for stell og vedlikehold

For å sikre at barnesetet har full beskyttende effekt:

- Ved en ulykke med en kollisjonshastighet på mer enn 10 km/t kan barnesetet bli skadet uten at skaden er umiddelbart synlig. I slike tilfeller må barnesetet skiftes ut. Vennligst kast det på riktig måte.
- Kontroller alle viktige deler regelmessig for skader. Sørg spesielt for at alle mekaniske komponenter fungerer som de skal.
- For å unngå skader må du passe på at barnesetet ikke kommer i klem mellom harde gjenstander (bildør, seteskiner osv.).
- Få alltid barnesetet kontrollert hvis det har blitt skadet (f.eks. hvis det har falt ned på gulvet).
- Du må aldri smøre eller olje deler av barnesetet.
- For at HERO-XL skal beskytte barnet ditt på riktig måte, er det viktig at du installerer og bruker HERO-XL nøyaktig slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.


IV. Bruk av ekstraustyret

4.1 Pelotteputer for thorax

Bryststøtter hjelper barnet med å stabilisere overkroppen hvis det har begrenset kontroll over overkroppen.

Putene er festet til en monteringsplate ved hjelp av borrelås. De kan løsnes med litt kraft. Når du har funnet den optimale posisjonen, skal putene festes på nytt ved å trykke i ryggens retning og vri litt.

Trekket på thoraxpelottene er avtakbart og vaskbart.

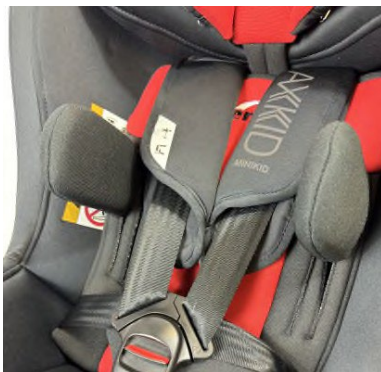

4.2 Abduksjonskile

Abduksjonskilen hjelper barnet med å holde beina i en kontrollert stilling. Den er festet til en solid monteringsramme og kan justeres i dybden og høyden ved hjelp av en hurtigutløserpak.

Trekket på abduksjonskilen er avtakbart og vaskbart.



IV. Bruk av ekstraustyret

4.3 Adapter for setedybde

Med setedybdeadapteren ❶ kan setedybden økes med ca. 10 cm. Dette betyr at HERO-XL også kan brukes til høyere barn.

Setedybdeadapteren er festet til en solid monteringsramme og kan justeres i dybden ved hjelp av en hurtigutløsserspåk.

❷.

Trekket er avtakbart og vaskbart.




4.3 Støtte- og sikkerhetsputer

Støtte- og sikkerhetsputen ❶ gjør at barnet kan hvile armene og stabilisere overkroppen.

Den kan justeres ved hjelp av to borrelåsstrop ❷ til baksiden av setet. Trekket er

avtakbart og vaskbart.

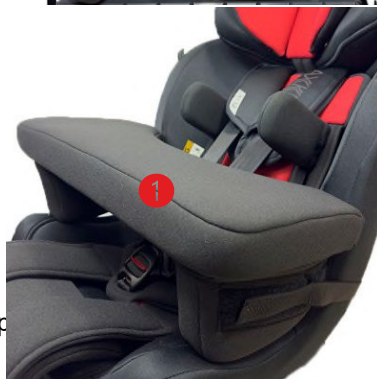

V. Garanti

HERNIK-produktene er toppmoderne og produseres i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Skulle du unntaksvis ha grunn til å reklamere, garanterer HERNIK GmbH i henhold til de generelle vilkårene og betingelsene, etter levering.

- 24 måneder på alle faste komponenter.
- 12 måneder på alle bevegelige deler.

Ingen garanti kan gis for spesialtilpassede produkter med mindre dette skyldes produksjons- eller materialfeil. I så fall gis det erstatning av det defekte produktet i 12 måneder.

Krav i henhold til denne garantien er betinget av at apparatet har blitt brukt på riktig måte i samsvar med bruksanvisningen.

Ved konstruksjonsendringer, omarbeiding eller feilaktige reparasjoner uten forutgående konsultasjon med HERNIK GmbH, bortfaller garantikravet.

Ytterligere krav, uansett rettslig grunnlag, særlig krav om erstatning for direkte eller indirekte skade, er utelukket.

VI Merking

Du finner følgende merking på baksiden:



Lesen Sie bitte vor Gebrauch die
Bedienungsanleitung!

VII Tekniske data

HERO-XL	
SITEBREDD (bekken)	24 cm
SITEBREDD (knær)	27 cm
SITTE DYBDE	25 - 34 cm
RYGHØYDE	28 - 45 cm
HODEHØYDE	48 - 68 cm
Høyde på bryststøtte	13 - 20 cm
Total høyde	65 - 82 cm
Total bredde	43 cm
Total dybde	55 cm
Testet belastbarhet	36 kg
Minste størrelse / maksimal størrelse	61 - 125 cm

HERNIK GmbH
Gewerbering 8, 83543 Rott am Inn

 +49 8035-9580448 -  +49 8035-9580446
info@hernik.de