


Kvikguide

Sæt dig godt tilbage på sædet, læn overkroppen let fremover.

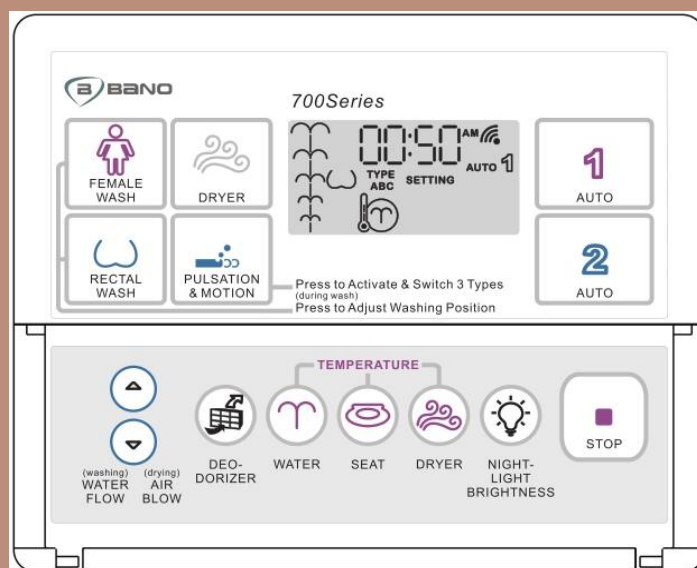



	Vask bagtil anbefalet vasketid ca. 40 – 50 sek.
	Vask fortil anbefalet vasketid ca. 10 sek.
	Pulsation / Motion (efter vask er igangsat) Tryk på knappen og skift mellem Vaskeprogrammer (fast position, oscillerende, pulserende)
	Tørring anbefalet tørretid ca. 4-6 min. Stopper når du rejser dig.
	Stop stopper alle igangværende funktion.
	Auto 1 & 2 udfører personligt vaske/tørreprogram Kan tilpasses individuelt. Se mere i brugermanual.
	

Produkt virker ikke? Forsøg altid inden du ringer.

1. Tag strøm fra produkt. Vent 15 sek. og tilslut igen
2. Udskift batterier i fjernbetjening.
3. Test igen – produkt virker kun når man sidder på sædet.

Bano Life ApS - Tlf. 75 56 32 44 - info@banolife.dk

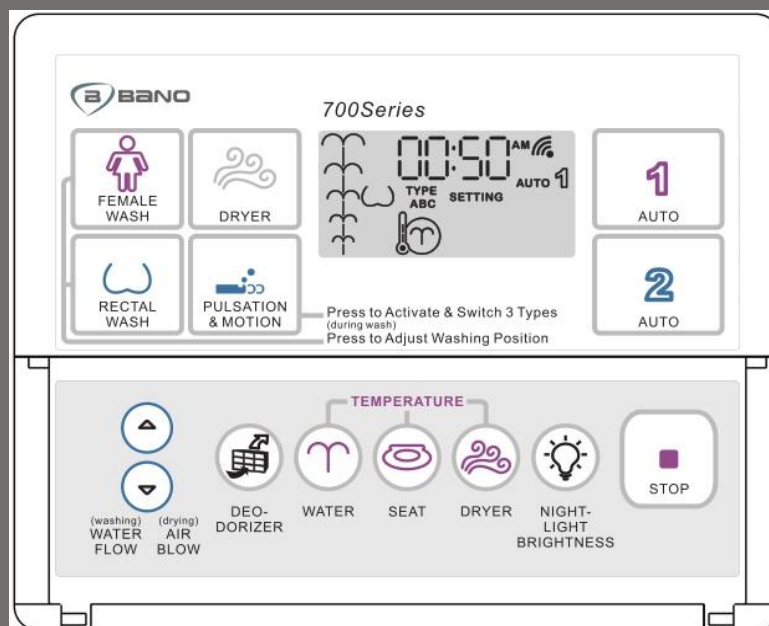

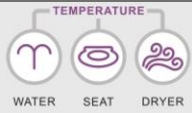 RECTAL WASH x2	Tilpas dyseposition 1. Aktiver vask 2. Tryk på vask igen 3. Juster position med hhv pil op og ned.
 TEMPERATURE WATER SEAT DRYER	Juster temperatur Sæde: Tryk på knappen – se termometer icon i display. Vand: Tryk på knappen - se termometer icon i display Tørre: Aktiver tørre – Tryk på knappen og se icon i display <i>Temperatur justeres i tre trin. Tryk flere gange for at skifte mellem trin.</i>
 DRYER	Juster lufthastighed 1. Aktiver tørrefunktion 2. Tryk hhv pil op og eller ned
 RECTAL WASH	Juster vandmængde / hastighed 1. Aktiver vask, herefter, 2. Tryk hhv pil op og ned for at justere vandmængde
	Indstil natlys Tryk gentagende gange på knappen og juster lysstyrke. Obs. LED-lys kan ikke slukkes helt (fungerer som indikator lys og standby)