

BRUKERMANUAL **CLEAN COMFORT GULVSTÅENDE**

280349 BANO CLEAN COMFORT TOALETTSKÅL GULVSTÅENDE

801977 BANO FAST TYNN SISTERNE MED ARMLENER

801976 BANO FAST TYNN SISTERNE UTEN ARMLENER



Introduksjon.....	3
Sikkerhetsforholdsregler.....	5
Spesifikasjoner.....	6
Tekniske tegninger.....	7
Oversikt over bideet.....	8
Fjernkontroll Clean Comfort.....	9
One-touch kontroll for Clean Comfort.....	16
Pleie, service og rengjøring.....	17
Oppstart & tilkobling av fjernkontroll.....	23
Feilsøking.....	25
Reservedeler.....	29
Plassering av produkt merke og identifikasjon	29

Bano Clean Comfort Gulvstående

Clean Comfort toalett er et integrert spyl-og-tørk-toalett. Det kombinerer essensiell funksjonalitet med fleksibel installasjon, og sikrer at hjelpemidler kan være både praktiske og stilige. Med sin IPx6-vannsikring kan det trygt installeres i våtrom, inkludert dusjsonen, noe som gjør det ideelt for kompakte bad og våtrom. Den robuste konstruksjonen gjør det også mulig å bruke det som en sikker dusjstol, som gir en tryggere og mer tilgjengelig baderomsopplevelse.

Designet for selvstendighet og tilgjengelighet

Laget for å støtte selvstendig intimhygiene, inkluderer Clean Comfort funksjoner tilpasset:

- Brukere med nedsatt mobilitet: Intuitive kontroller og justerbare innstillinger gjør det enkelt å bruke.
- Personer med redusert sittestabilitet: Gir stabil sittestilling for både toalettbruk og sittende dusjing.
- Plassbesparende løsninger: Perfekt for små bad hvor toalett og dusj er nær hverandre.
- Omsorgspersoner: Reduserer behovet for risikofylte forflytninger og gjør assistert pleie enklere.

Hygienisk og robust konstruksjon

- Hygieniske materialer: Laget av rengjøringsvennlig plast og porselen.
- Holdbart design: IPx6-ratingen sikrer langvarig ytelse, selv i våtrom.
- Solid konstruksjon: Porselenskålen er utviklet for å tåle en brukervekt på 200 kg.

Forbedrede komfortfunksjoner

- Oppvarmet sete: Gir varme og trygghet.
- Nattplys: Integrert i bidetsetet for praktisk bruk om natten.



Lukt-kontroll og intelligent vask

- Innebygget luftfilter: Fjerner lukt direkte fra toalettskålen for et friskere baderom.
- Tilpassbar vask & tørk:
- Manuelle valg: Bakvask, frontvask, tørk.
 - Automatiske programmer: Kombinerer soyl og tørk. Tilpasset både menn og kvinner.
- Både manuelle og automatiske vaskeprogrammer har intuitive innstillingsmuligheter:
 - Justerbare innstillinger for vanntemperatur, vannmengde og dyseposisjon.
 - Pulsasjon og bevegelig dyse.
 - Justerbar lufttemperatur og luftmengde.

Enkel styring med fjernkontroll

- Både standard Clean Comfort-fjernkontrollen og Intuitive fjernkontrollen gir enkel tilgang til de to automatiske programmene, stopp-knappen og tørkefunksjonene.
- Et valgfritt roterende hjul på siden av setet kan også brukes til å styre bidéen.

Fleksibel plassering med IPx6-beskyttelse

Med IPx6-vannbeskyttelse tilbyr toalettet:

- Installasjon i dusjsonen: Trygg plassering inne i dusjområdet.
- Dobbelt bruk som dusjstol: Gir støtte ved sittende dusjing.
- Pålitelig ytelse: Konstruert for å tåle vann uten å kompromittere elektrisk sikkerhet.

Clean Comfort vegghengt spyl-og-tørk-toalett kombinerer funksjonalitet, stil og tilgjengelighet. IPx6-beskyttelsen gjør fleksibel installasjon mulig, også inne i dusjsonen. Designet for å fremme selvstendighet, hygiene og komfort, er det en ideell løsning for eldre brukere og personer med nedsatt funksjonsevne — der komfort møter smart design.





Leverandøren skal ikke være ansvarlig for noe tap som oppstår som følge av manglende overholdelse av følgende instruksjoner:


- Dette utstyret er en “type 1” elektrisk enhet og må være fullt koblet til jordingssystemet.
- Dette er et elektrisk apparat og skal derfor ikke installeres på steder der det kan utsettes for overdrevent sprut utenfor bruksområdet, eller for høye temperaturer. Installer ventilasjon/avtrekk i badet for tilstrekkelig lufting.
- Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av produsent, serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person.
- Apparatet kan brukes av personer over 3 år, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner dersom de får opplæring/tilsyn. I slike tilfeller anbefales lavt trykk og lav temperatur.
- Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Apparatet er permanent koblet til vannforsyningen. Vannet skal kun frakobles ved installasjon og vedlikehold.




- Ikke sett inn eller trekk ut støpselet med våte hender — fare for elektrisk støt.
- Ikke skad strømledning eller støpsel — fare for kortslutning, brann eller støt.
- Ikke bruk stikkontakten dersom den er løs.
- Strømtilførselen må brukes i henhold til forskrifter — feil bruk kan føre til brann eller støt.
- Ikke demonter eller reparer produktet selv — fare for elektrisk støt eller brann.
- Ikke plasser varmekilder eller åpen flamme i nærheten.
- Unngå at vann, rengjøringsmidler eller organisk materiale kommer på støpselet.
- Ikke snu produktet opp-ned — kan skade det.
- Ikke bøy/inntrekk vannslangen, da dette kan gi lekkasje
- Bruk kun nye medfølgende slanger — gamle slanger anbefales ikke.

Vask	Bakvask	✓
	Frontvask (for kvinner)	✓
	Massasje	✓
	Justerbar vanntemperatur	AV / 5 nivåer (standard: nivå 3)
	Justerbar vannmengde	5 nivåer (standard: nivå 3)
	Justerbar sprayposisjon	5 nivåer (standard: nivå 5)
Varm luft	Lufttørring	✓
	Justerbar luftmengde	5 nivåer (standard: nivå 3)
	Justerbar tørketemperatur	AV / nivåer (standard: nivå 3)
Oppvarmet sete	Oppvarmet sete	✓
	Justerbar setetemperatur	AV / nivåer (standard: nivå 3)
Hygiene	Luktfjerner	✓
	Automatisk dyserengjøring	✓
	Manuell dyserengjøring	✓
Avkalking		✓
Brukere		2 brukere
Nattlys		✓
Pustende lys		✓
Mykstengende sete og lokk		✓
Dreieknapp for betjening		✓
Rimless-toalett		✓
Monteringstype		Gulvstående
Vannkobling		G 1/2
Nominell spenning		AC220-240V, 50/60Hz
Effekt		1170W
Lengde på strømkabel		1.8m
Vannforsyningsstrykk		0.07-0.75MPa (0.7-7.5Bar)
Vannforsynings-temperatur		4-35°C
Anbefalt omgivelsestemperatur		4-40°C
Beskyttelsesgrad		IPX6
Vaskesystem	Vannmengde	350-650mL/min
	Vanntemperatur	31-39°C
	Vaskesyklus	3 minutter
	Oppvarmingstype	Tank
	Varmeeffekt (vann)	1200W
	Sikkerhet	Termisk sikring, nivåsensor, termostat
	Tilbakeslagsvern	luftgap, type AB
Tørkesystem	Luftfart	≥ 4m/S
	Tørkerens effekt	350W
	Tørketid per syklus	3 minutter
	Lufttemperatur	35-50°C
	Sikkerhet	Termisk sikring, termostat
Luftfjerner	Modus	Diatomfilter
	Syklustid	15 minutter
Oppvarmet sete	Effekt	50W
	Temperatur	29-37°C / AV
	Sikkerhet	Termisk sikring, termostat
Fjernkontroll	Frekvensområde	2460MHz
	Maks. RF-effekt	-9.04dBm
	Antall/Type batterier	2 stk CR2032 (3V)
Andre sikkerhetsfunksjoner		Jordfeilbryter (RCD)
Maks brukervekt		200kg
Vekt (bidet + skål)		31.5kg

Tekniske tegninger

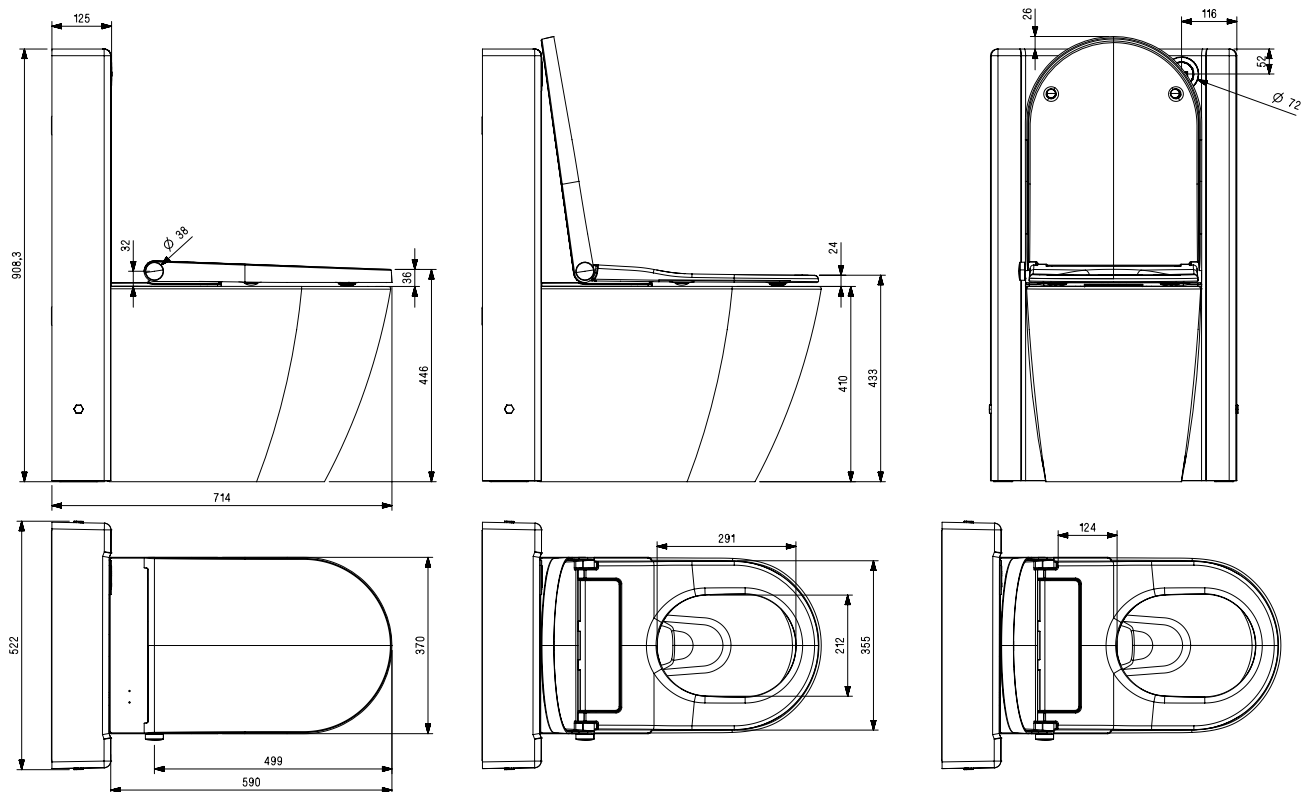


Med valgfrie armlener

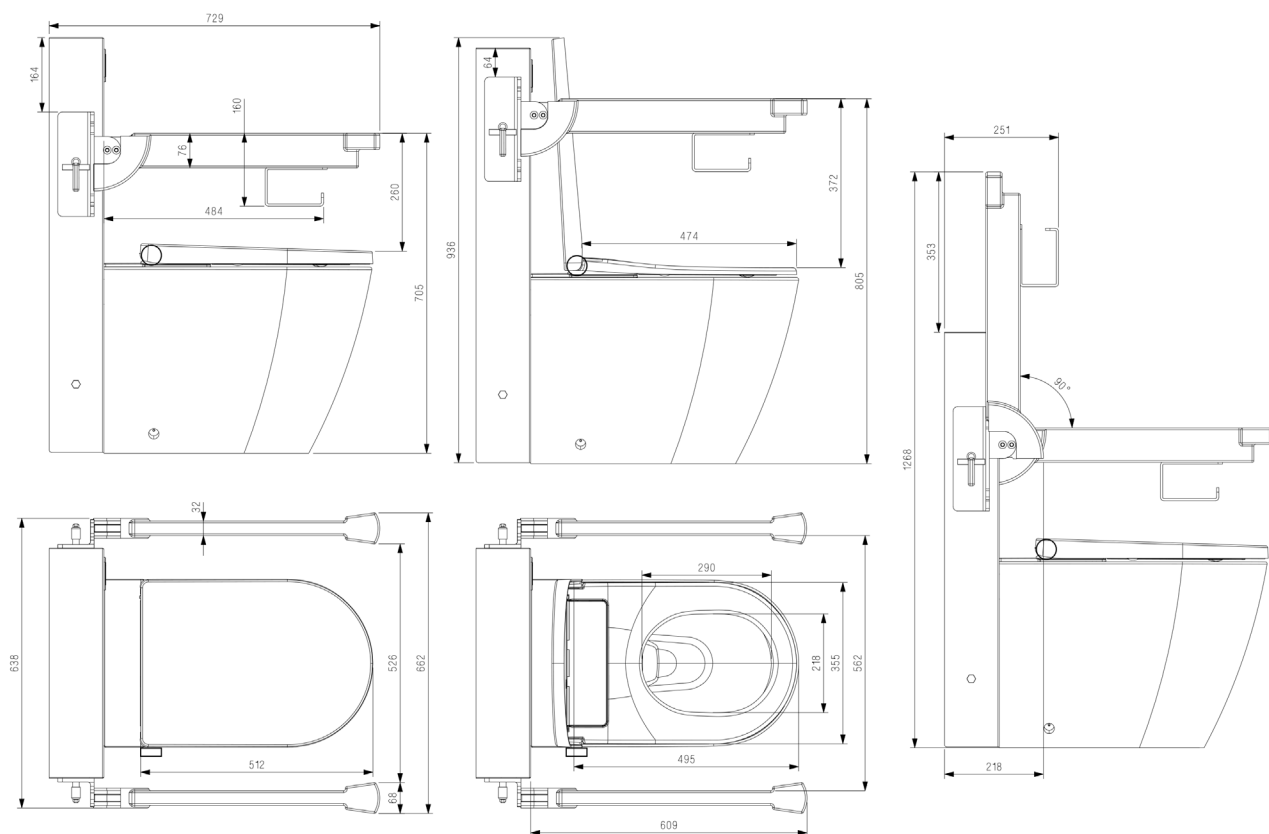


Alle dimensjoner er i mm

Bideenhetsoversikt

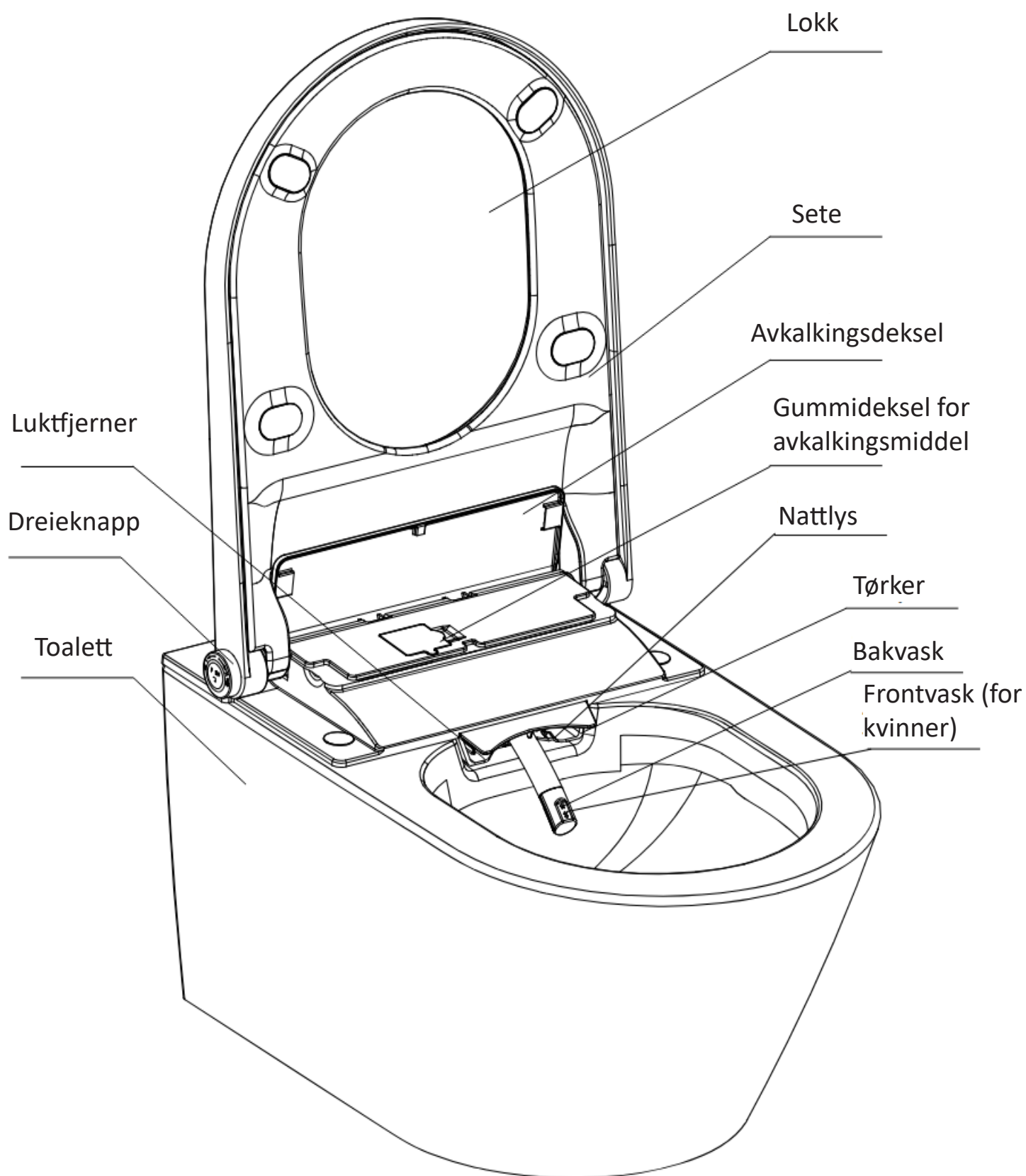


Bildene er kun til illustrasjon.

Fjernkontroll Clean Comfort (801687) (Automatisk nedtrekk)

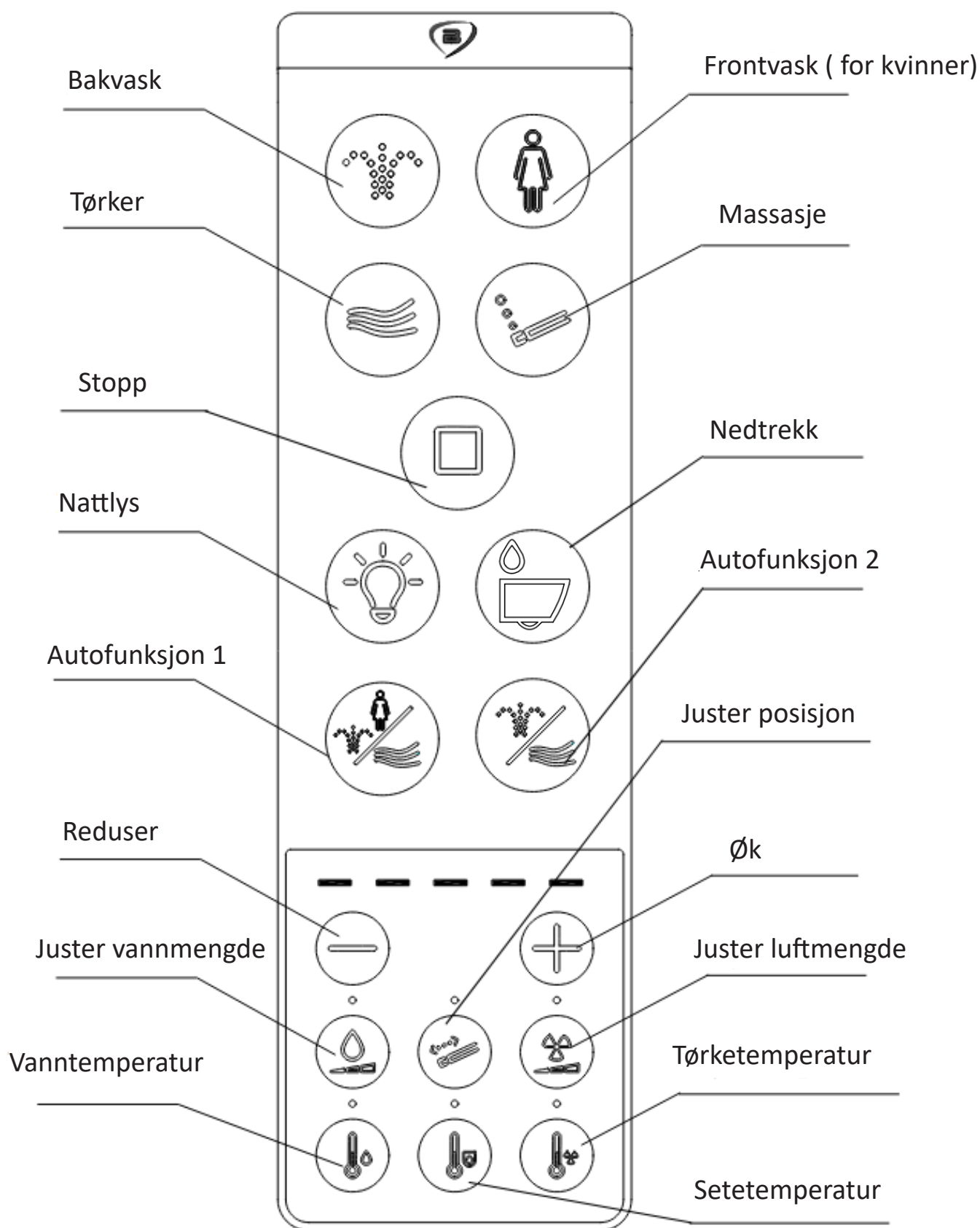

Fjernkontrollen krever batterier (2 stk. × 3V CR2032)

One-touch-kontroll for Clean Comfort (801689) (Tilbehør)

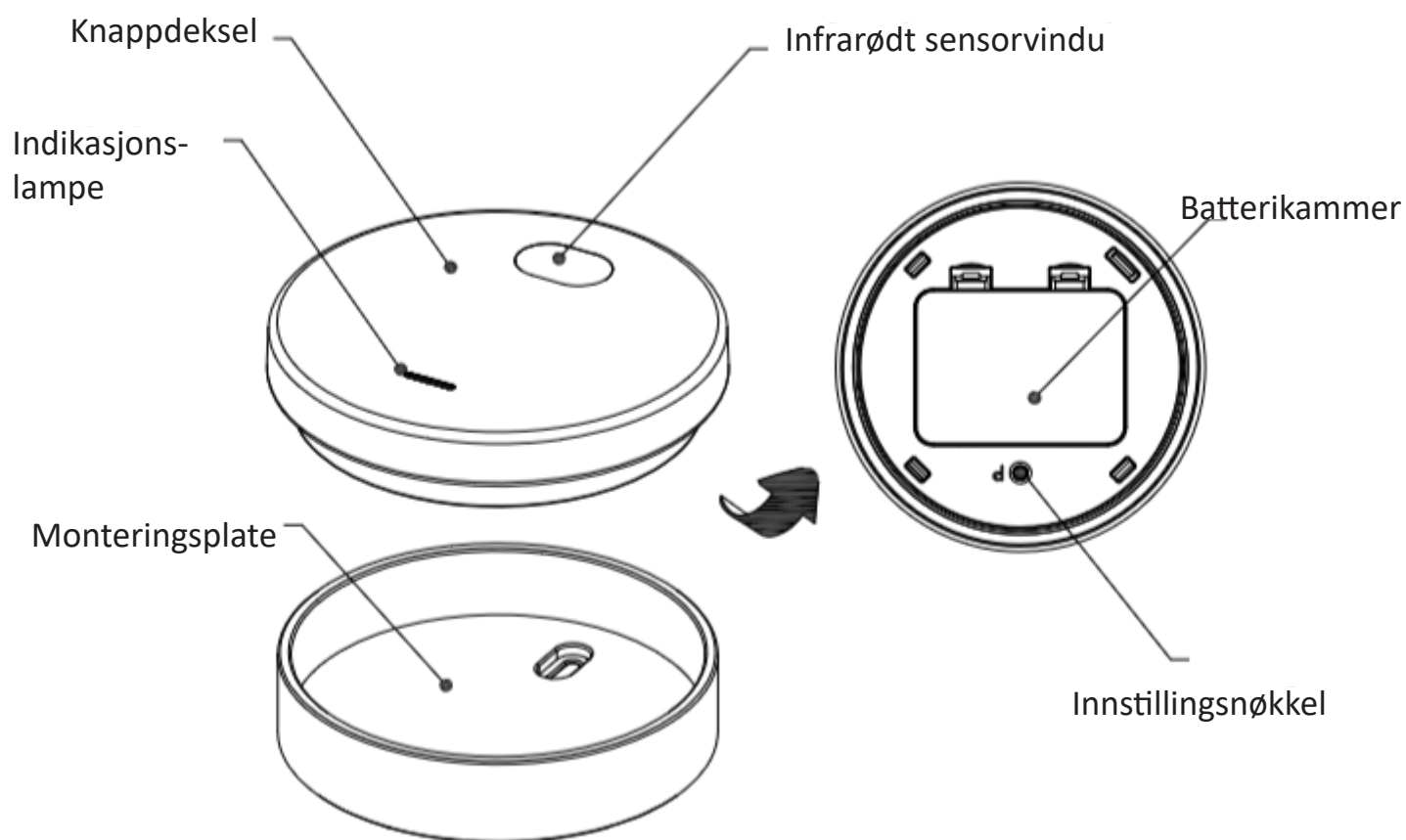


Bildene er kun for illustrasjon.

Bakvask/Frontvask

Mens du sitter

Trykk på «Wash»-knappen på fjernkontrollen for å starte vaskeprogrammet. Det stopper automatisk etter 3 minutter. Du kan stoppe vasken manuelt før dette ved å trykke på «Stop»-knappen.

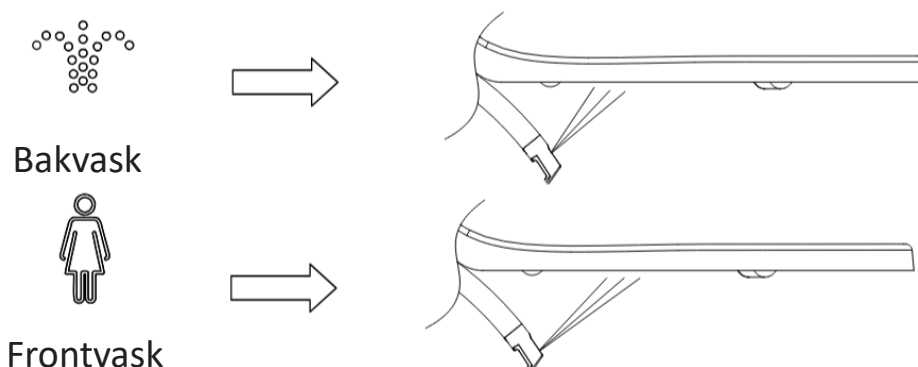


Merk: Når bakvask eller frontvask kjører, vil systemet først føre dysen ut og vaske i en fast posisjon i omtrent 10 sekunder. Deretter går det inn i en bevegelig vaskefase i omtrent 18 sekunder, før det går tilbake til fast posisjon for resten av programmet.

Tørking

Mens du sitter


Trykk på «Dry»-knappen på fjernkontrollen for å starte tørkeprogrammet. Det vil kjøre i 3 minutter.

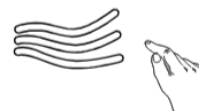

Alternativt

Mens du sitter, med systemet i standby-modus

Trykk på rotasjonsknappen på siden av systemet. Programmet vil da kjøre i 3 minutter.

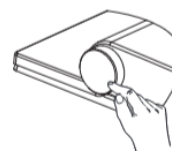

Massasjevask

Under bakvask eller frontvask

Trykk på «Massage»-knappen på fjernkontrollen for å bla gjennom alternativene og velge ønsket strålemodus:



Oscillerende: når én indikatorlampe lyser



Pulserende: når to indikatorlamper lyser



Oscillerende + pulserende: når tre indikatorlamper lyser





Stopp-funksjon

Under bakvask, frontvask eller tørkeprogram

Trykk på «Stop»-knappen på fjernkontrollen for å stoppe gjeldende program.

Alternativt

Trykk på rotasjonsknappen for å stoppe gjeldende program.

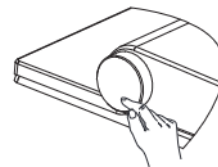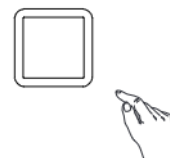



Justering av vannmengde

Under bakvask eller frontvask

Trykk på «Adjust water flow»-knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på «Redusere» eller «Øke» for å justere vannmengden til ønsket nivå.

Alternativt

Juster vannmengden ved å vende rotasjonsknappen. Vannmengden øker når den vendes med klokken, og minker når den vendes mot klokken.

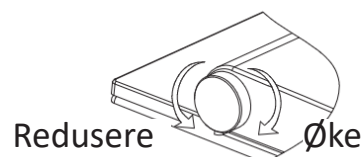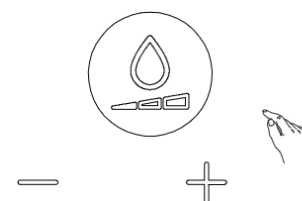



Justering av luftmengde

Under tørkeprogrammet

Trykk på «Adjust air flow»-knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på «Redusere» eller «Øke» for å justere luftmengden til ønsket nivå.

Alternativt

Juster vannmengden ved å dreie rotasjonsknappen. Vannmengden øker når den dreies med klokken, og reduseres når den dreies mot klokken.

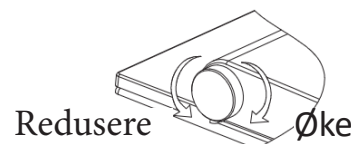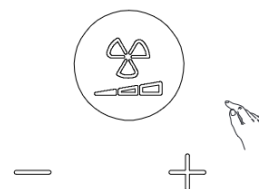

Justering av dyseposisjon

Under bakvask eller frontvask

Trykk på «Adjust position»-knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på «Redusere» eller «Øke» for å justere dyseposisjonen til ønsket plassering.

Standardinnstillingen for dysen er posisjon 5.




Justering av vanntemperatur

Trykk på «Adjust water temperature»-knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på «Increase» eller «Decrease» for å justere vanntemperaturen.

Alternativt

Under bakvask eller frontvask

Trykk og hold rotasjonsknappen og vend den. Vanntemperaturen øker når den vendes med klokken, og reduseres når den vendes mot klokken.

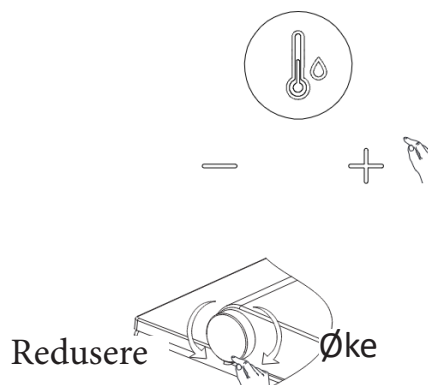


Justering av lufttemperatur

Trykk på «juster lufttemperatur»-knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på «øk» eller «reduser» for å stille inn lufttemperaturen.

Alternativt


Under tørking

Trykk og hold rotasjonsknappen og vend den. Lufttemperaturen øker når den vendes med klokken, og reduseres når den vendes mot klokken.

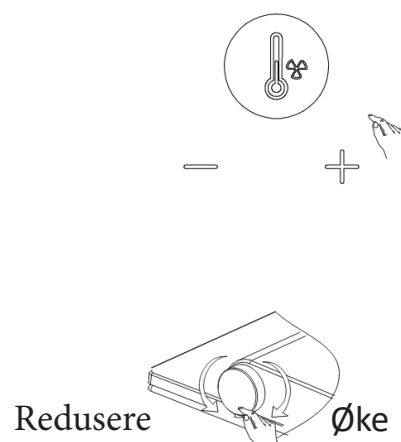

Justering av setetemperatur

Trykk på «juster setetemperatur»-knappen på fjernkontrollen, og trykk deretter på «øk» eller «reduser» for å stille setetemperaturen.

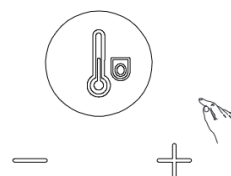


Slå lyden av eller på

Lyd er slått på som standard, og det kommer et hørbart pip når bidéen mottar en kommando eller et signal

Åpne lokket og setet

Trykk og hold rotasjonsknappen inne, og vend den deretter. Lyden slås på når den vendes med klokken, og slås av når den vendes mot klokken

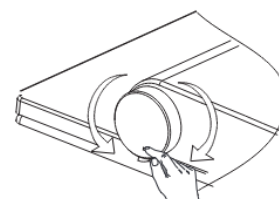

Lysinnstillinger

Nattlyset er «alltid på»-modus som standard

Trykk gjentatte ganger på «nattlys»-knappen på fjernkontrollen for å bla gjennom de forskjellige innstillingene:



«Lukket modus» – én indikatorlampe lyser



«Alltid på-modus» – to indikatorlamper lyser




«Smart-modus» – tre indikatorlamper lyser



Alternativt


Åpne lokket og setet, og mens du ikke sitter på systemet, vend rotasjonsknappen mot klokken. Dette vil bla «nattlys»-funksjonen gjennom de ulike modusene.

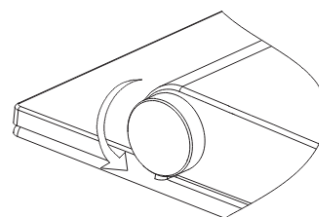

Merk: «smart-modus» gjør at «nattlys» tennes i mørke omgivelser og slukkes i lyse omgivelser

Deodoriser (801687)

Hold inne «Stopp» mens du trykker på knappen «Juster luftstrøm» på fjernkontrollen for å velge mellom de to ulike innstillingene:

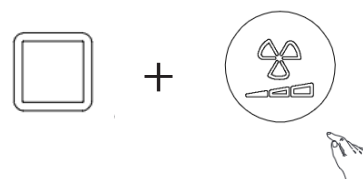

AV - én indikatorlampe lyser



«Smart-modus» - to indikatorlamper lyser



Merk: «smart-modus» gjør at luktfjerner aktiveres når du setter deg på toalettet, og slår seg av ett minutt etter at du reiser deg

Nedtrekk og Automatisk nedtrekk (801687)

Trykk på «Nedtrekk» for å skylle toalettet når som helst.



«Automatisk nedtrekk» er satt som standard: bideen skyller automatisk etter bruk.

For å slå automatisk skylling av/på og justere tidsforsinkelsen:

Hold inne «Stopp» mens du trykker gjentatte ganger på «Nedtrekk» på fjernkontrollen for å bla gjennom de ulike innstillingene:

AV - én indikatorlampe lyser




5 sek - to indikatorlamper lyser



10 sek - tre indikatorlamper lyser




15 sek - fire indikatorlamper lyser

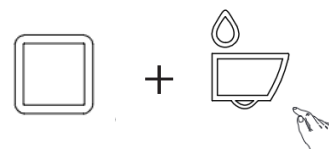

Innstillinger for «pustelys»

Innstillinger for «pustelys»

Med lokket åpent og mens du sitter, og uten at vaske- eller tørkefunksjonene kjører, trykk og hold inne rotasjonsknappen i 6 sekunder – dette slår «pustelyset» av. Det kan slås på igjen ved å gjenta prosessen.

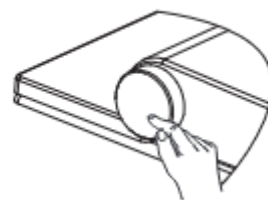

6s


Innstillinger for «autofunksjon»

1. Trykk på «autofunksjon 1»-knappen på fjernkontrollen for å starte følgende program:
bakvask (2 minutter) → frontvask (1 minutt) → tørking (4 minutter).




Alternativt

Denne funksjonen kan brukes ved å vri på rotasjonsknappen. Drei den med klokken for å starte autofunksjon 1.

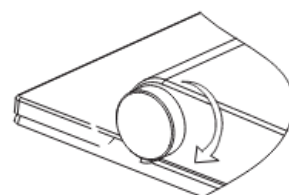


2. Trykk på «Autofunction 2»-knappen på fjernkontrollen for å starte følgende program: Bakvask (2 minutter) → Tørk (4 minutter).

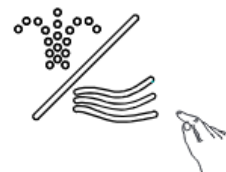

Alternativt

Drei rotasjonsknappen mot klokken for å starte autofunksjon 2.

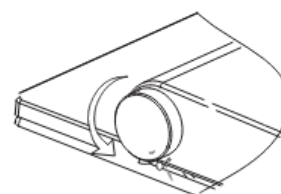


Merk: Under autofunksjon 1 eller 2 vil et trykk på knappen hoppe programmet videre til neste fase. For å avslutte autofunksjon 1 eller 2 via knappen må den holdes inne i 2 sekunder for å avbryte programmet.

Strømsparings-/standbymodus-innstillinger

Mens du ikke sitter på setet og lokket er lukket:

Trykk og hold rotasjonsknappen i mer enn 6 sekunder for å sette bidéen i strømsparingsmodus.

Trykk og hold knappen igjen i 6 sekunder for å starte den på nytt.

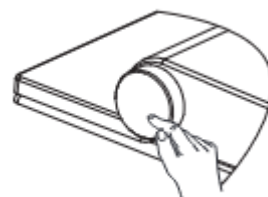


>6s

One-Touch Control for Clean Comfort (801689) (Tilbehør)

Fjernkontrollen (801689) har følgende funksjoner:

- Nøkkelfunksjon:


Mens du sitter, trykk eller trå kort på knappen/dekselet på fjernkontrollen for å starte autofunksjon 1.

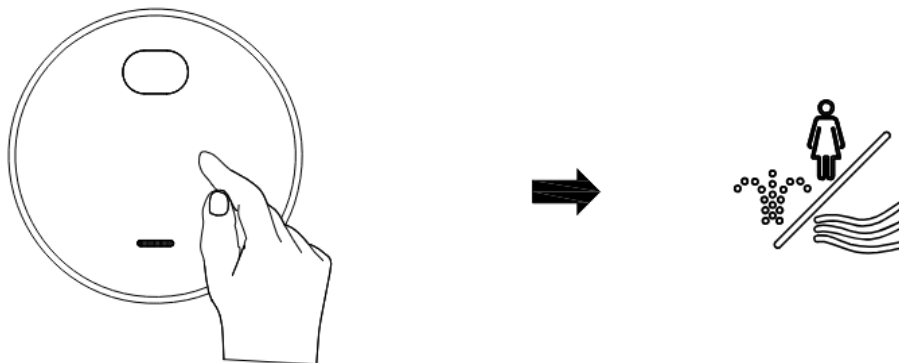

- Vifte-/bevegelsesfunksjon:

Mens du sitter, dekk til IR-vinduet et øyeblikk for å starte autofunksjon 2.

Infrarødt
sensorvindu

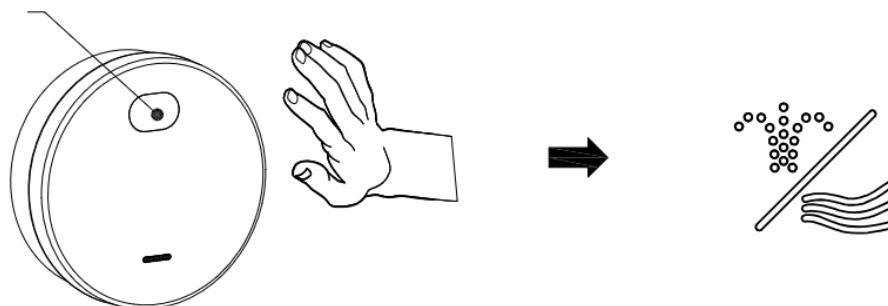

Pleie, service og rengjøring

Generelle anbefalinger for pleie og rengjøring

Clean Comfort er et hjelpemiddel for personlig hygiene beregnet for gjentatt bruk i hjemmemiljøer og pleiemiljøer.

Vedlikehold består av manuell rengjøring med eventuell desinfeksjon på lavt nivå.

Følgende metoder er **ikke tillat**:

- Sterilisering
- Høynivådesinfeksjon
- Bløtlegging
- Høytrykkspyling eller damping

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsaktivitet
Daglig	Fjern vanndråper med en myk, lofri klut for å unngå kalkflekker
Ukentlig	Rengjør alle overflater på bidéen. Kontroller og rengjør også spyledysen manuelt ved behov (se «Dyserengjøring» side 20)
Månedlig	Rengjør de keramiske delene av WC med et lavt syreholdig rengjøringsmiddel
Hver 6. måned	Kontroller og bytt filter ved behov
Årlig	Avkalk enheten (se «Avkalking av enhet», side 21)

Kompatible rengjørings- og desinfeksjonsmidler

Clean Comfort er vurdert for material- og funksjonskompatibilitet med følgende rengjørings- og desinfeksjonsmidler når de brukes utelukkende i samsvar med denne manualen:

- TASKI Sani Cid Pur-ECO SD W1e
- Terralin Protect
- Rely+ON PeraSafe

Kompatibiliteten gjelder kun når disse produktene brukes i henhold til produsentens instruksjoner og denne manualen, inkludert påføring med myke, ikke-slipende kluter eller svamper, etterfulgt av skylling med rent kaldt vann og tørking. Bruk av andre kjemiske midler eller rengjøringsprodukter anbefales ikke, med mindre deres kompatibilitet er uttrykkelig bekreftet av produsenten.

Metoder for rengjøring og (ved behov) desinfeksjon:

Rengjøringsmiddel	Type
TASKI Sani Cid Pur-ECO SD W1e*	Rengjøringsmiddel for baderom
Terralin Protect	Desinfeksjonsmiddel og generelt biocidprodukt
Rely+ON PeraSafe*	Desinfeksjon

IP forbehold

Referanser til tredjepartsprodukter

Referanser til spesifikke rengjørings- eller desinfeksjonsmidler, inkludert deres merkenavn og produsenter, er kun gitt til informasjonsformål.

Alle varemerker, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter tilhører deres respektive eiere. Inkluderingen av slike referanser utgjør verken en sertifisering eller en juridisk godkjenning for bruk av disse produktene, og innebærer heller ikke noe kommersielt forhold.


Produsenten av hjelpemiddelet påtar seg intet ansvar eller forpliktelser som følger av regulatorisk status, sammensetning eller tilgjengelighet av tredjeparts rengjørings- eller desinfeksjonsprodukter.

Godkjent rengjøringsmetode

For å sikre sikker bruk, funksjonell integritet og lang levetid for dette hjelpemiddelet, skal følgende metode benyttes uten avvik:

1. Påfør rengjørings- eller desinfeksjonsmiddelet kun på:
 - En myk, ikke-slipende engangs mikrofiberklut
 - En myk engangsklut basert på cellulose
 - En ikke-slipende svamp med åpne celler (f.eks. WipeOut-svamp)
2. Rengjør enhetens overflater ved å tørke fra de minst forurensede overflatene til de mest forurensede overflatene.
3. Ikke spray rengjørings- eller desinfeksjonsmidler direkte på enheten.
4. Etter avtørking skal alle behandlede overflater skylles med rent, kaldt vann for å fjerne kjemiske rester. (Det kan være praktisk å bruke en håndholdt lavtrykks vannspray/nebulisator.)
5. Tørk alle overflater med en myk engangsklut valgt blant de som er angitt i punkt 1.

Denne prosedyren gjelder for alle bruker-tilgjengelige overflater, inkludert sete, støttearmer, ryggstøtte, betjeningsgrensesnitt og ytre kapsling.

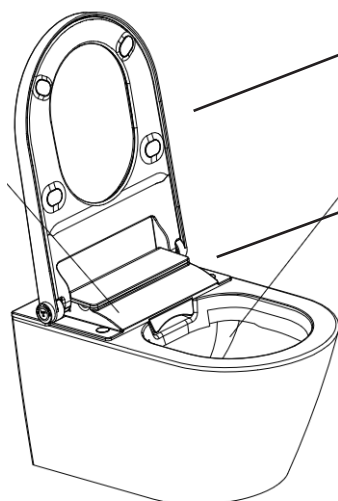

Illustrert

For armlener

- Fuktig myk klut eller svamp (som beksrevet ovenfor)

For E-bidet

- Identifisert i øvrig seksjon

For toalletskål

- Myk, silikonbasert dobørste

Bruk rengjøringsmidler som beskrevet i øvrig seksjon.



Slipende verktøy, direkte spraying, nedsenking eller påføring av kjemikalier ved andre metoder enn de som er beskrevet ovenfor, er ikke tillatt.

Ikke-godkjent rengjøringsmetode

For å forhindre skade, funksjonssvikt eller redusert levetid, er følgende strengt forbudt:

- Slipende kluter, børster eller svamper
- Bløtlegging av produkt eller at væske trenger inn i mekanismen
- Direkte spraying eller skumming av kjemikalier på overflater
- Bruk av ikke-godkjente sure, alkaliske eller oksiderende midler
- Overdreven mekanisk kraft under rengjøring
- Avvik fra kjemikalieprodusentens instruksjoner eller fra denne manualen

Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til skade på overflater, bevegelige deler eller bærestrukturer.

Selvrensende skål

Dersom spylefunksjonen ikke brukes i mer enn 72 timer, vil bidetet starte et selvrenseprogram som varer i omtrent 3 minutter. Knapper og funksjoner er deaktivert under dette programmet. Systemet vil automatisk gå tilbake til normal funksjon så snart selvrenseprogrammet er fullført.






Selvrenseprogrammet kan avbrytes ved å trykke på «Stopp»-knappen på fjernkontrollen eller på siden av bidetet.

Rengjøring av dyse

Dysen rengjøres automatisk før og etter vask

Manuell rengjøring utføres som følger:

Åpne lokk og sete, og vend deretter rotasjonsknappen med klokken. Dysen vil da kjøres ut med rengjøringsvann. Dysen trekkes inn igjen etter 5 minutter, eller dersom «Stop»-knappen trykkes.

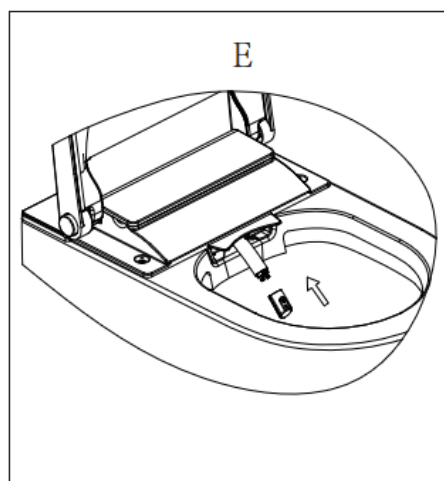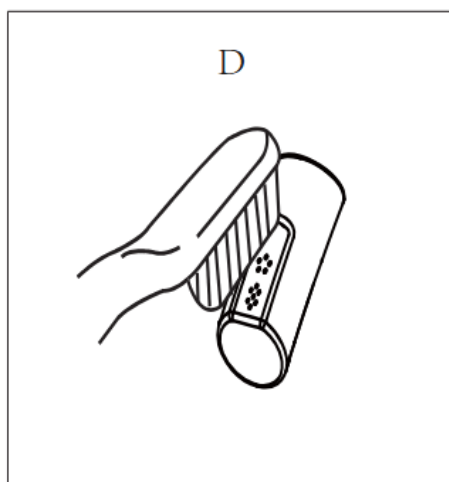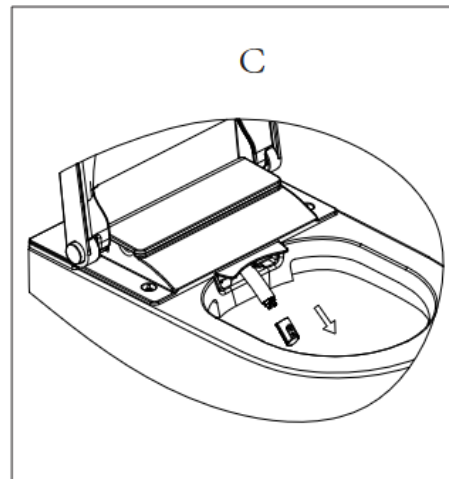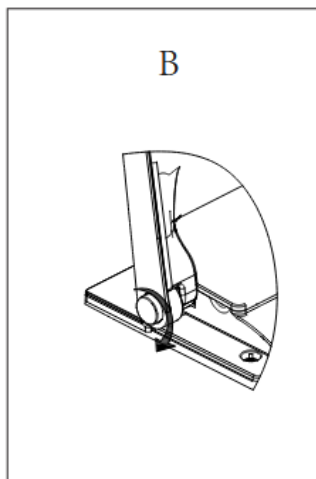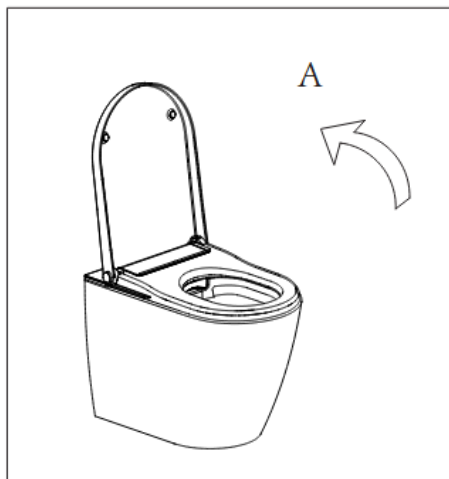





Utskifting av vannfilter

Filteret har en levetid på 6 måneder, avhengig av vannkvalitet.

Filteret skal byttes dersom vaskevannets gjennomstrømning er redusert.

900986

Vannfilter – Clean Comfort

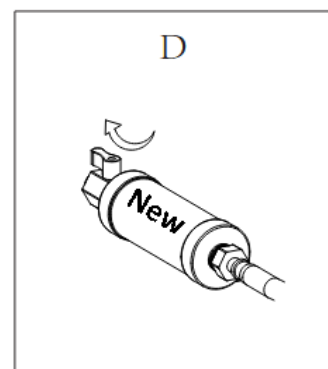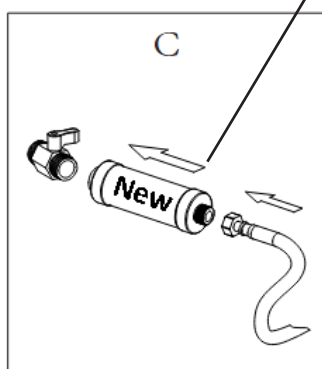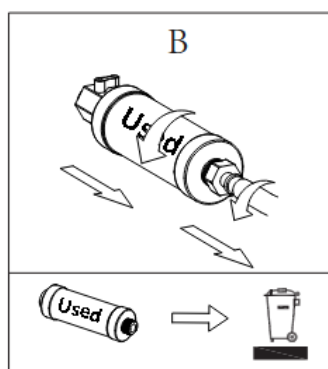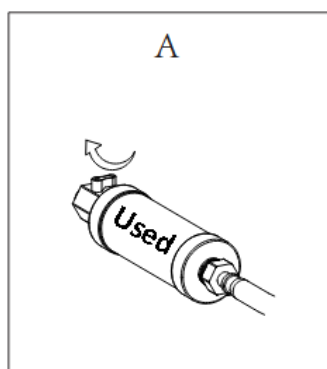

Avkalking av enheten

Systemet må avkalkes minst én gang per år, eller oftere avhengig av antall vaskesykluser og kvaliteten på vannforsyningen.

Under avkalkingsprosessen kan toalettet fortsatt brukes, men vaskefunksjonene er ikke tilgjengelige.

Avkalkingsprosessen kan ta opptil 30 minutter. I denne perioden vil en grønn LED-lampe blinke, og enheten vil gi fra seg et hørbart signal. Når den grønne LED-lampen slutter å blinke og slår seg av, er prosessen fullført og vaskefunksjonen kan brukes igjen.


Bruk avkalkingsmidler som ikke skummer for mye.



For å unngå skade på enheten eller personskade, må det ikke brukes avkalkingsmidler som er for sterke eller aggressive.

1

Åpne lokk og sete

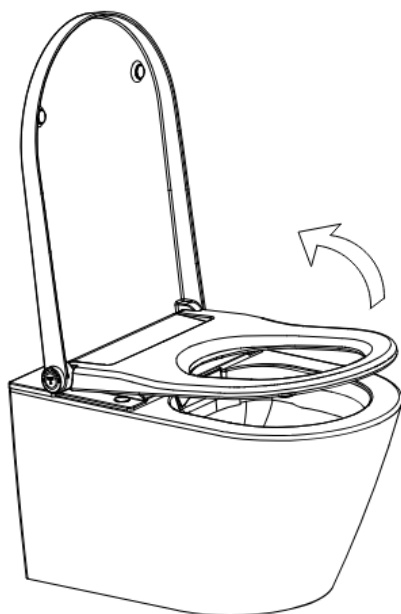

2


Åpne avkalkingsdekselet



Når avkalkingsdekselet åpnes, starter tømning av vann fra tanken, slik at det blir plass til avkalkingsmiddelet. Tilsett avkalkingsmiddelet etter at du hører et pip fra maskinen.


3

Åpne gummidekselet

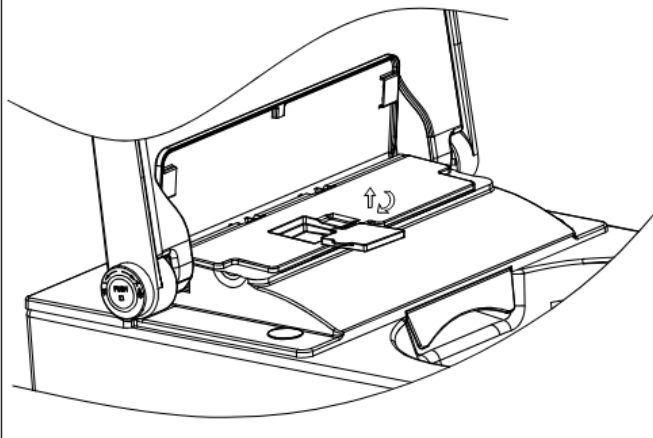


4

Tilsett ca. 150 ml avkalkingsmiddel

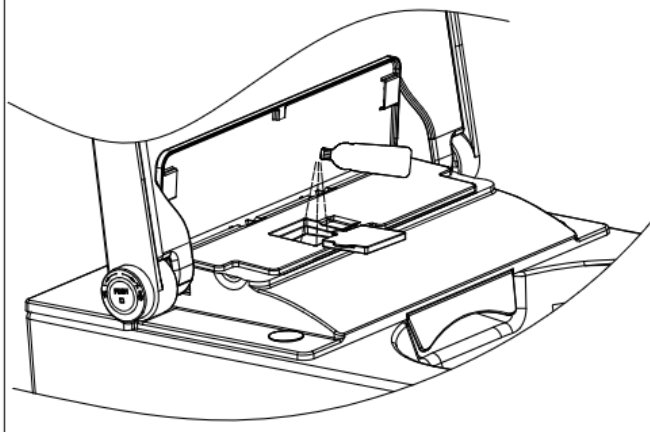

5


Lukk gummidekselet og
avkalkingsdekselet

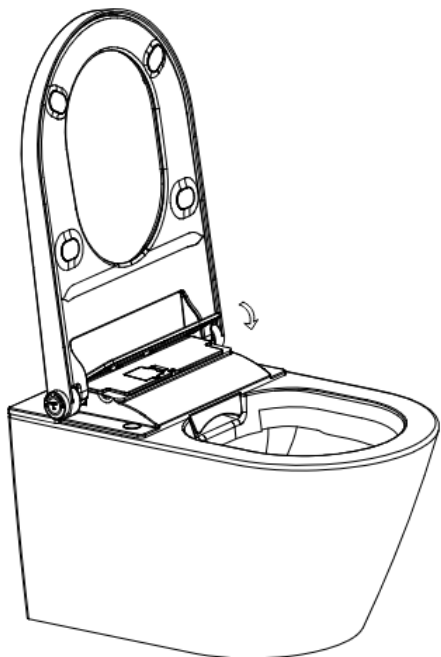



6

Avkalkingsprosessen starter når lokket lukkes. Under denne prosessen kan toalettet brukes, men vaskeprogrammene vil ikke være tilgjengelige. Prosessen tar ca. 30 minutter. I løpet av denne tiden vil LED-lyset på knotten blinke. Når LED-lyset slutter å blinke, vil pustelyset slå seg på igjen (dersom det ikke er slått av), og du vil høre et langt «pip». Dette indikerer at vaskeprogrammene igjen er klare til bruk.

Utskifting av luktfilter

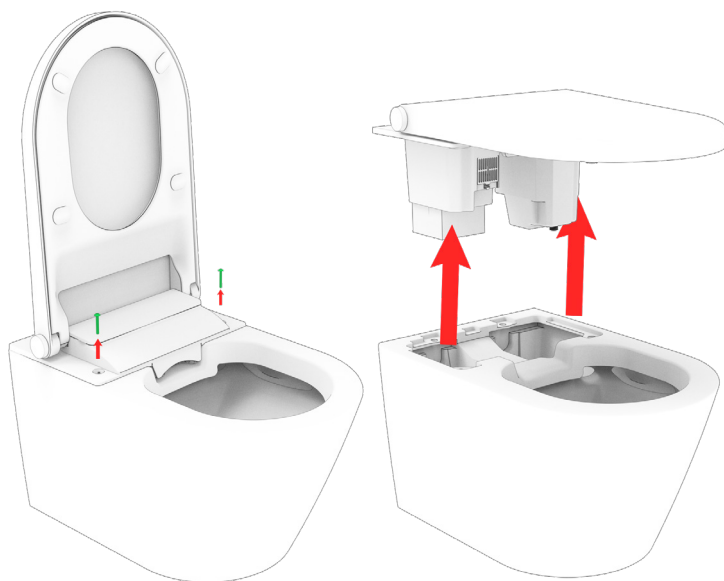

Luktfilteret har en anbefalt levetid på
ca. 6 måneder

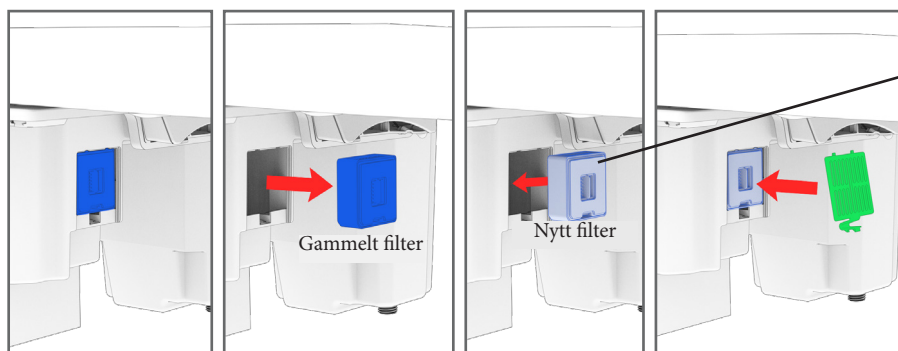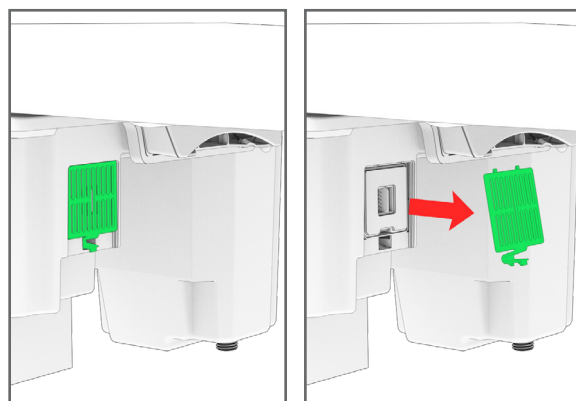

900989



Luktfilter – Clean Comfort

Du kan merke redusert
effekt av luktfunksjonen når
filteret nærmer seg slutten
av levetiden

Tømming av vanntanken



1. Vann- og strømforsyningen må slås av eller kobles fra før bidéen demonteres
2. Ikke vipp eller snu enheten før vanntanken er tømt

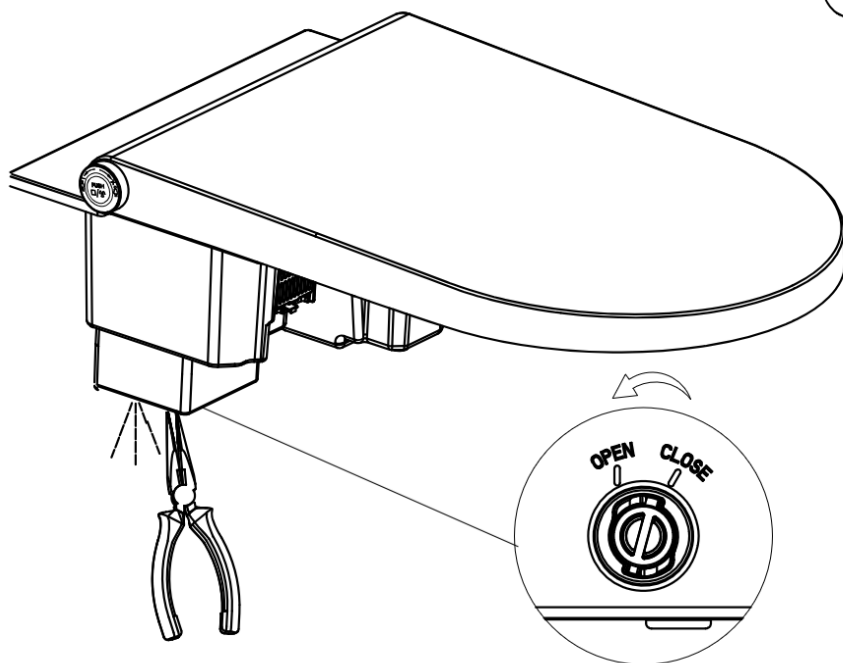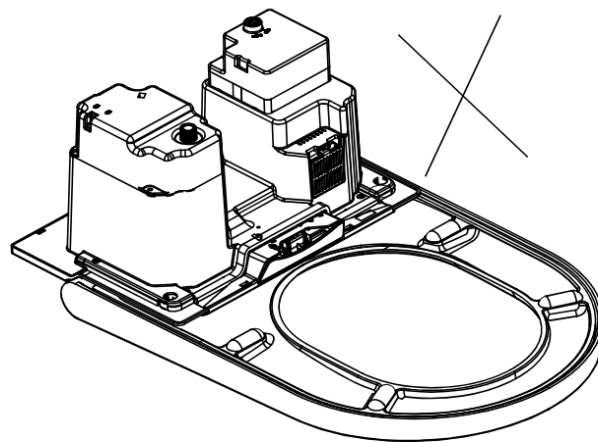


1. Bruk en tang til å vri pluggen til «Open»-posisjon og trekk den ut. Vann vil da begynne å renne ut av tanken.
2. Når vannet er ferdig med å renne ut, sett pluggen inn igjen og vri den tilbake til «Closed»-posisjon

Prosedyre for paring av fjernkontroll


Hvis flere elektroniske bidéer installeres i samme område, og du ønsker at hver fjernkontroll skal styre én bestemt elektronisk bidé, fullfør oppsettet ved å følge disse trinnene:

1. Åpne både lokk og sete, men ikke sett deg på bidéen
2. På aktuell fjernkontroll: trykk og hold inne «Stop»-knappen og «Water Temperature»-knappen samtidig til alle de 5 LED-lysene lyser, og slipp deretter knappene
3. Trykk «-» og «+» for å velge ulike koder for hver elektroniske bidé
4. På bidéen: trykk og slipp rotasjonsknappen
5. På fjernkontrollen: trykk og slipp «Stop»-knappen. Den elektroniske bidéen vil da avgi et langt «pip». Dette indikerer at oppsettet er fullført

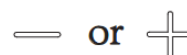


Alternativt

1. Trykk og hold inne «Female Wash»-knappen på fjernkontrollen i ca. 5 sekunder. Indikatorlysene vil deretter tennes etter tur. Etter et kort «pip» vil indikatorene begynne å blinke
2. Trykk på sideknappen på bidéet. Indikatorene på fjernkontrollen slutter å blinke og lyser kontinuerlig i 2 sekunder. Når du hører et langt «pip», er paringsprosessen fullført

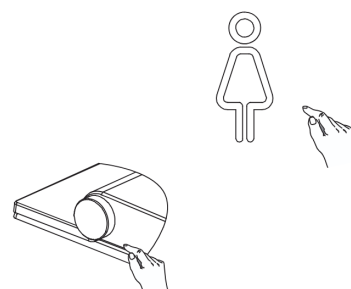

Bytte av batterier – fjernkontroll

- Fjernkontrollen krever to batterier (3V CR2032)
 - Når indikatorlysene blinker kontinuerlig, indikerer dette at batteriene snart bør byttes
1. Ikke forsøk å lade ikke-oppladbare batterier
 2. Oppladbare batterier skal tas ut av fjernkontrollen før de lades
 3. Ikke bland nye og brukte batterier i fjernkontrollen
 4. Batteriene skal settes inn med korrekt orientering og polaritet
 5. Utbrukte batterier skal tas ut og kastes på korrekt måte
 6. Dersom fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid, skal batteriene tas ut før lagring
 7. Ikke kortslutt polene i fjernkontrollen

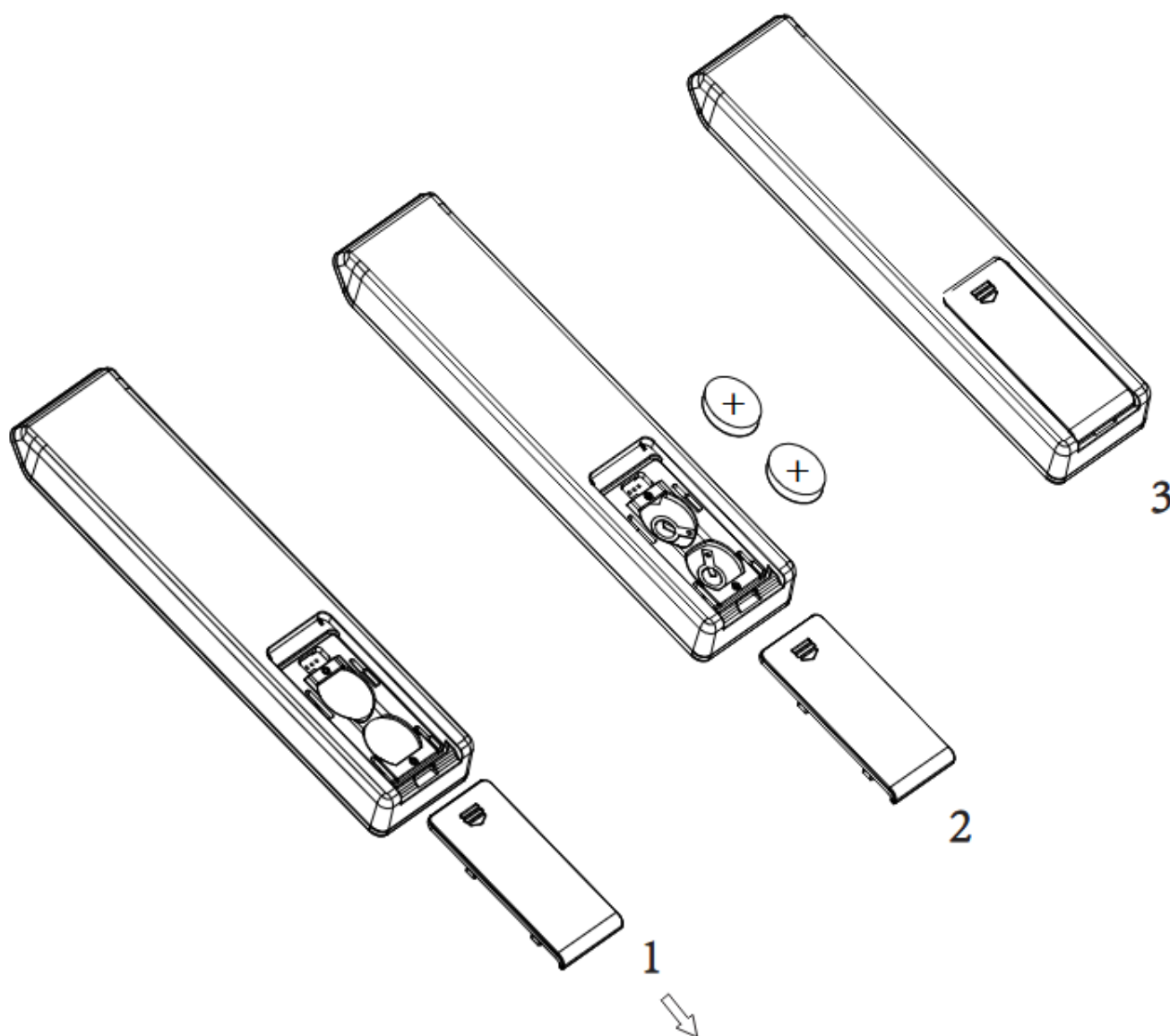

Gjenopprett fabrikkinnstillinger for fjernkontrollen

Etter at batteriene er tatt ut og deretter satt inn igjen, vil indikatorlysene tennes. Trykk og hold inne «Stop»-knappen på fjernkontrollen. Dette vil føre til at indikatorlysene tennes ett etter ett. Deretter kan knappen slippes, da prosessen er fullført.

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Spyleprogrammet fungerer ikke	Strømforsyningen er kanskje ikke tilkoblet	Kontroller at strømmen er korrekt tilkoblet og slått på
	Vannforsyningen er kanskje ikke tilkoblet	Kontroller at vannet er korrekt tilkoblet og slått på
	Filteret kan være tett	Bytt filteret – det har en levetid på ca. 6 måneder
	Bidéet er ikke i «sitte»-modus	Sett deg på bidéet og juster sittestillingen
	Toalettlokket er lukket	Åpne toalettlokket og sett deg på setet
	Bidéfunksjonene har ikke vært brukt på over 72 timer	Bidéen utfører selvrens i ca. 3 minutter – vask er ikke tilgjengelig i denne perioden
Dysen trekkes plutselig inn	Vaskesyklusen avsluttes automatisk etter 3 minutter	Dette er normalt – du kan trykke på «wash»-knappen igjen for å starte programmet på nytt
	Problem med vannforsyningen	Kontroller tilkobling og gjennomstrømning på vanninntaket
	Sensoren registrerer at ingen sitter	Juster sittestillingen og prøv igjen
	Toalettlokket lukkes	Ikke senk toalettlokket under vask
Lav vannmengde	Gjennomstrømningen kan være stilt for lavt	Dette kan justeres via fjernkontrollen eller rotasjonsknappen
	Vanntrykket er for lavt	Sørg for at vanntrykket er $\geq 0,07$ MPa
	Filteret kan være tett	Bytt filteret – det har en levetid på ca. 6 måneder
	Dysen kan være blokkert	Rengjør eller bytt dysen
Lav vanntemperatur	Vanntemperaturen kan være stilt for lavt	Dette kan justeres via fjernkontrollen eller rotasjonsknappen
	Temperaturen på vannforsyningen kan være for lav	Øk vanntemperaturen og/eller reduser vannmengden
Dysen kjøres ut svært sakte	Dysen kan være i selvrensemodus	Dette er en del av normal drift
Vann renner ut, men dysen kjøres ikke ut	Dysen kan være i selvrensemodus	Dette er en del av normal drift
	Bidéfunksjonene har ikke vært brukt på over 72 timer	Bidéet vil utføre selvrens i ca. 3 minutter – vask er ikke tilgjengelig i denne perioden
Tørkefunksjonen fungerer ikke	Strømforsyningen er kanskje ikke tilkoblet	Kontroller at strømmen er korrekt tilkoblet og slått på
	Bidéet er ikke i sittemodus	Sett deg på bidéen og juster sittestillingen
	Toalettlokket er lukket	Åpne toalettlokket og sett deg på setet
	Bidéfunksjonene har ikke vært brukt på over 72 timer	Bidéet vil utføre selvrens i ca. 3 minutter – tørkefunksjonen er ikke tilgjengelig i denne perioden
Lav lufttemperatur	Lufttemperaturen kan være stilt for lavt	Dette kan justeres via fjernkontrollen eller rotasjonsknappen
	Luftvarmeren fungerer ikke korrekt	Kontakt Bano
Nattlyset er alltid av	Omgivelsene er for lyse	I smart-modus vil lyset kun lyse i mørke omgivelser
	Innstillingen for nattlys kan være slått av	Dette kan slås av/på ved hjelp av fjernkontrollen eller rotasjonsknappen

Nattlyset er alltid på	Omgivelsene er for mørke	I smart-modus vil lyset bare slå seg av i mørke omgivelser
	Noe dekker knappen/sensoren	Fjern eventuelle hindringer fra dette området
	Lyset kan være stilt til «Always on»	Dette kan slås av/på ved hjelp av fjernkontrollen eller knotten
Dysen trekkes automatisk inn under manuell rengjøring	Dysen trekkes inn etter 5 minutter	Dette er normalt – prosessen kan startes på nytt dersom du ikke er ferdig med rengjøringen
	«Stop»-knappen er trykket	Rengjøringsprosessen stoppes, og dysen trekkes inn dersom denne knappen trykkes
	Toalettlokket lukkes	Ikke senk toalettlokket under rengjøring
Fjernkontrollen fungerer ikke	Det kan være et problem med batterienes montering	Kontroller at begge batteriene er riktig montert
	Batterikapasiteten kan være lav	Bytt batteriene
	Fjernkontrollen kan være koblet til feil bidé	Kjør én-til-én-oppsettet for å synkronisere riktig fjernkontroll og bidé
Det høres pipelyder mens bidéen er i bruk	Det gis pipelyder ved å sette seg ned, reise seg opp og trykke på knapper	Dette er normalt, og kan slås av/på via fjernkontrollen eller hjulet
Bidéet fungerer ikke korrekt	Det foreligger en mekanisk eller elektrisk feil	Slå av strømmen til enheten i ett minutt, koble deretter til igjen og prøv på nytt. Dersom problemet vedvarer, kontakt Bano
Lyset rundt rotasjonsknappen blinker dobbelt og piper kontinuerlig	Temperaturen på vannforsyningen er for høy	Slå av strøm- og vannforsyningen, avstå fra å bruke enheten og kontakt Bano
Lyset rundt rotasjonsknappen blinker kontinuerlig	Det kan være et problem med bidéen	Kontroller strøm- og vannforsyning, slå av strømmen og start enheten på nytt. Dersom problemet vedvarer, kontakt Bano



Elektriske apparater og batterier skal ikke kastes som usortert husholdningsavfall. Bruk alltid separate og godkjente innsamlings- og avfallsordninger.

Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av enheten og dens komponenter. Dersom elektriske apparater og komponenter avhendes feil, kan farlige stoffer lekke ut i miljøet og forårsake skade.

Ved utskifting av gamle apparater med nye, er forhandler lovpålagt å ta imot de gamle apparatene kostnadsfritt for korrekt avhending.

Reservedeler

Delnavn	Itemnr.
Toalettssete med lokk for Clean Comfort	900966
Vannpumpe – Clean Comfort	900985
Vannfilter – Clean Comfort	900986
Fjernkontroll – Clean Comfort	801687
Vanntankmodul – Clean Comfort	900988
Luftfilter – Clean Comfort	900989
Dysesett – Clean Comfort	900990
Inntaksventil – Clean Comfort	900991
Elektronisk modul – Clean Comfort	900616
Hovedkort – Clean Comfort	140201
Vifte-enhet – Clean Comfort	900814

Plassering av produktmerke og -identifikasjon

